

Qufora® IrriSedo MiniGo

Matalan volyymin suolihuuhtelujärjestelmä

Komponentit

- Pehmeä pumppu keinukorkilla, joka liitetään kartioon
- Suolihuuhtelukartio hydrofiilisella päällysteellä, joka aktivoituu vedellä
- Tarvike: letkusto



Pehmeä pumppu



Kartio

Letkusto - *tarvike*

Tuoteominaisuudet

Pehmeä pumppu keinukartiolla

- Yhtä helppokäyttöinen kuin tavallisen pullon täyttö. "Klick" ääni vahvistaa, kun keinukansi on turvallisesti kiinni.
- Pehmeä pumppu on helppo puristaa, jopa useamman kerran ja yksitievientiili, joka estää takaisinvirtauksen.
- Riittävä vesimäärä suolihuuhteluun (jopa 160 ml) voidaan viedä suoleen ilman pumpun uudelleen käyttöä.

Kertakäyttöisen kartion pussi

- Kartion hygieeniseen käyttöön.
- Kätevä kertakäyttöinen pussi kartion hävittämiseen käytön jälkeen.

Laatikko

- Tuotteiden varastointi käytön välillä.

Pehmeä hydrofiilinen kartio pehmeällä päällä

- Helppo kiinnittää ja irrottaa pehmeästä pumpusta.
- Suunniteltu soveltumaan suolen anatomiaan.
- Hydrofiilisen kartion vedellä aktivoinnin ja vesitäytön sekä kartion pumppuun yhdistämisen jälkeen valmis käytettäväksi.



Valmistusmateriaalit

Osa	Materiaali	Pehmennin
Pehmeä pumppu		
Säiliö	TPE	Ei pehmenintä
Keinukorkki	PP	Ei pehmenintä
Yksitievientiili	Silikoni	Ei pehmenintä
Kartio		
Kartio	TPE	Ei pehmenintä
Päällyste	Hydrofiilinen PVP	Ei pehmenintä
Letkusto		
Letkusto	TPE	Ei pehmenintä
Kansiliitin	TPE	Ei pehmenintä
Kartioliitin	ABS	Ei pehmenintä

Mitat ja painot

Osa	Mitat	Paino	
Pehmeä pumppu	Pituus	80 mm	41 g
	Leveys	60 mm	
	Korkeus	95 mm	
	Volume	180 ml	
Kartio	Pituus	59 mm	7,5 g
	Leveys	39 mm	
	Korkeus	68 mm	
Letkusto	Kok.pituus	n. 680 mm	12 g
	Vapaa pituus	min 625 mm	

Käyttöaikausotukset

- Pehmeää pumppua voidaan käyttää 30 pv (kuukausi*)
- Kartio on kertakäyttöinen
- Letku on kertakäyttöinen

*Kun käytetään päivittäin

Käyttöikä valmistuksesta

Käyttöikä on ilmoitettu tarrassa.

Varastointi

Varastoi kuivassa paikassa 0 ... +30 °C.

Poissa suorasta auringonvalosta ja lasten ulottuvilta.

Hävittäminen

Qufora IrriSedo MiniGo hävitetään normaalina kotitalousjätteenä, ei tarvitse erikoiskäsittelyä.

Luokittelu ja sterilointi

Qufora IrriSedo MiniGo on tehdaspuhdas, luokan I lääkinällinen laite.

Sertifikaatit

Regulation (EU) 2017/745

Standards: ISO 13485: 2016

Ympäristöasiat

- Valmistettu PVC- ja ftalaattivapaista materiaaleista
- Kevennetty pehmeä pumppu ja kartio
- Uudistettu pakkaus toimii myös tuotteiden säilytyksessä huuhtelujen välillä, vähentäen ylimääräisen pakkausmateriaalin tarvetta

Markkinointi: OneMed Oy, www.onemed.fi
PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki
p. 020 786 6810, asiakaspalvelu@onemed.com

ONEMED

ONEMED

Qufora A/S
Gydevang 28-30
2450 Allerød
Denmark

Tel: +45 88 30 05 92
info@qufora.com
www.qufora.com

 **Qufora**[®]
Your life. Our inspiration.

