

**Dynacast®**



## **DYNACAST® PRELUDE**

MONEEN TILANTEESEEN MUKAUTUVAT LASTAT

# MONEEN TILANTEESEEN MUKAUTUVAT LASTAT

Dynacast® Preluden uudenlainen, patentoitu materiaali on kolmiulotteisesti kudottu käyttäen uutta ILP-teknologiaa (Interlocking Performance), joka lukitsee hartsin lastan ytimeen.

Seitsemän erillisen, laminaattien avulla yhdessä pysyvän kerroksen sijaan Dynacast® Prelude koostuu vain yhdestä, lomittain kudotusta kerroksesta. Tämä tarjoaa seuraavia etuja:

- Ohuempi ja yhtenäinen rakenne, joka kestää pidempään kuin 7 yksittäistä kerrosta
- 25 % kestävämpi
- Helpompi muotoilla ja leikata
- Ei rypisty, tasaisempi lopputulos
- Pehmeämmät, potilaalle miellyttävämmät reunat
- Ei ongelmia laminaation kanssa

## Muita hyviä Dynacast® Preluden ominaisuuksia:

- Pehmuste molemmilla puolilla, ei riskiä käyttää väärää puolta
- Kovettuu nopeasti pienelläkin määrällä vettä
- Hyvin venyvä pehmuste on helposti muotoiltava ja turvallinen käyttää.
- Saatavilla sekä rullana että valmiiksi leikattuna lastana
- Patentoitu rullamuoto: ei materiaalihävikkiä
- Määrämittaiset lastat: käteviä käytössä

## Dynacast® Prelude on kustannustehokas lastoitujärjestelmä, joka soveltuu kaikkiin immobilisaation vaiheisiin

- Akuutti vaihe
- Postoperatiivinen hoito
- Pitkäaikainen käyttö

## Käyttöohje

- 1 Määritä koko ja pituus.
  - 2 Leikkaa haluttu pituus.
  - 3 Taivuta laatikossa olevan rullan reuna.
  - 4 Paina puristin (joka on toimitettu laatikossa) pään ympärille ja varmista, että se on tasaisesti.
  - 5 Ota lasta pois foliopakkauksesta ja vedä pehmustetta vähän lasikuitulastan yli, jotta se peittää reunat.
  - 6 Lisää vettä vesipullon tai juoksevan veden avulla. Lämmin vesi lisää lämpöä kovettumisaikana. Kierrä lastaa, jotta saat liian veden pois.
  - 7 Kääri lasta pyyhkeeseen, jotta voit poistaa lisää vettä. Toista jäljellä olevan veden poistamiseksi.
  - 8 Aseta lasta potilaaseen ja kiinnitä tukisiteellä. Lasta muotoutuu 2 - 4 minuutin ajan, kunnes se on kovettunut.
- Kuormitusaika n. 20 minuuttia.

## TILAUSTIEDOT

### Järjestelmän rullavaihtoehdot

Tuotenumero	Koko	Pakkauskoko
71418-02	2,5 cm x 4,6 m	1
71420-00	5 cm x 4,6 m	1
71421-00	7,5 cm x 4,6 m	1
71415-02	10 cm x 4,6 m	1
71416-00	12,5 cm x 4,6 m	1
71417-00	15 cm x 4,6 m	1
71419-00	20 cm x 2,3 m	1



### Prelude pre-cut – pehmustettu

Tuotenumero	Koko	Pakkauskoko
47223-00	7,5 cm x 40 cm	5
47224-00	10 cm x 30 cm	5
47225-00	10 cm x 40 cm	5
47226-00	10 cm x 76 cm	4
47235-00	12,5 cm x 76 cm	4



### Prelude Solo pre-cut – pehmustamaton

Tuotenumero	Koko	Pakkauskoko
72963-00	5 cm x 25 cm	10
72963-01	7,5 cm x 30 cm	10
72963-02	7,5 cm x 87 cm	10
72963-03	10 cm x 38 cm	10
72963-04	10 cm x 75 cm	10
72963-05	12,5 cm x 75 cm	10
72963-06	15 cm x 30 cm	10

### Strap kits – tarrakiinnitys

Tuotenumero	Koko	Pakkaus-koko
71415-18	Tarranauhat yläraajoille 1,6 cm x 43 cm (1) 5 cm x 50 cm (2)	10
71415-19	Tarranauhat alaraajoille 5 cm x 57 cm (3)	10

