



Semi-permeabel film¹

Absorberande hydrocellulärt skum

Lätt vidhäftande sårkontaktlager²



 **smith&nephew**
ALLEVYN[◇]
Gentle

ALLEVYN® Gentle ger en effektiv vätskehantering tack var den unika trippelverkande teknologin som absorberar, bibehåller och släpper igenom sårvätska^{1,3,4}. Resultatet blir en sårmiljö med optimal fuktbalans som främjar sårhäkning⁴.

- Unik trippelverkande teknologi som består av en toppfilm med hög genomsläpplighet, ett högabsorberande hydrocellulärt skum¹ och ett lätt vidhäftande kontaktlager belagt med Soft-Gel^{2,4}
- Lätt vidhäftande kontaktlager belagt med Soft-Gel innebär att förbandet är lämpligt till skör och känslig hud²
- Mjuk och behaglig för patienten, formbart för anatomiskt utmanande former⁵
- Tillgänglig i flera storlekar vilka kan anpassas till svårbandagerade områden
- Enkel att applicera och ta bort⁶, den lätta vidhäftningen håller förbandet på plats så att ett sekundärförband lättare kan appliceras⁶
- Lämplig att använda under kompression²

Indikationer

ALLEVYN Gentle är indikerat för sårbehandling av sekundärläkande, grunda, granulerande sår, svårärläka- och akuta vätskande sår, hel- eller delhudssår såsom trycksår, fotsår hos diabetiker, bensår, svampbelastade sår, infekterade sår, maligna sår, kirurgiska sår, tagställen, 1:a och 2:a gradens brännskador och epidermolysis bullosa sår.

Applicering

Rengör såret enligt lokala riktlinjer. Välj ett förband i lämplig storlek. Rengör och förbered kringliggande hud och torka torrt.

ALLEVYN Gentle kan klippas för att passa utmanande områden. Använd alltid aseptisk teknik när du klipper till förbandet.

Avlägsna överflödig hårväxt för att få bättre vidhäftning.

Öppna förpackningen med ALLEVYN Gentle med ren teknik, applicera den vidhäftande sidan mot såret, försäkra dig om att förbandet har bra kontakt med såret och fäst med sekundärt förband t.ex. OPSITE® Flexifix, OPSITE Flexifix Gentle. ALLEVYN Gentle kan lyftas och återappliceras utan att mista sin vidhäftande förmåga.

ALLEVYN Gentle kan användas i kombination med andra behandlingar t.ex. under kompression men ska då övervakas av sjukvårdspersonal. När den används under kompression måste förbandet klippas till för att passa sårets storlek och inte överlappa kringliggande huden. Försäkra dig om att förbandet inte har flyttat på sig innan applicering av kompressionslinda.

Om förbandet har klippts till, försäkra dig om att allt exponerat skum täcks med lämplig film - utan att täcka hela förbandet.

Omlägningsfrekvens

I början av sårbehandlingen ska förbandet kontrolleras ofta. Om ALLEVYN Gentle används på infekterade sår ska infektionen undersökas och behandlas enligt lokala kliniska riktlinjer. Förbandet kan sitta på plats upp till 7 dagar eller tills exudatet når 1.5 cm från kanten beroende på vilket som inträffar först. För förband applicerade sacralt gäller 5 dagar. Området uppmanar till täta kontroller då risken för kontamination är hög. Beslutet om förbandsbyte ska fattas efter klinisk bedömning. Lokala kliniska riktlinjer ska beaktas.

Borttagning av förband

För att avlägsna ALLEVYN Gentle, ta bort sekundärförbandet och lyft förbandet av såret.

Försiktighetsåtgärder

Använd inte ALLEVYN Gentle tillsammans med oxiderande ämnen såsom hypokloritlösningar (e.g. EUSOL) eller väteperoxid, då dessa ämnen kan bryta ner det absorberande polyuretanutet i förbandet. Om rodnad eller ömhet uppstår, avbryt behandlingen och konsultera sjukvård. ALLEVYN Gentle är enbart för engångsbruk. Vid användning under kompression kan ALLEVYN Gentle flytta på sig om det uppstår en snabb minskning av ödem.



Beställningsinformation

Artikel nr	Storlek	Antal/fp
66800247	5cm x 5cm	10
66800248	10cm x 10cm	10
66800249	10cm x 20cm	10
66800250	15cm x 15cm	10
66800251	20cm x 20cm	10

Referenser

1. Technical Justification AG0011, November 2007.
2. Data on File: 0709060 – Comparison of the fluid handling capacity of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Non-Adhesive and other competitor products. L. Tompkins. September 2007.
3. Technical Justification AG001, November 2007.
4. Technical Justification AG0013, November 2007.
5. Technical Justification AG009, November 2007.
6. Data on File 0711086: Results from a 7 day volunteer trial evaluating ALLEVYN Gentle dressings in terms of pain on removal, dressing retention and other physical characteristics. Amy Bond. November 2007.

ALLEVYN - People first, outcomes follow

For patients. For budgets. For today.®

Wound Management
Smith & Nephew
Kråketorpsgatan 20
431 22 Mölndal

T +46 (0) 31 746 58 00
F +46 (0) 31 87 05 31

www.smith-nephew.com

®Varumärke från Smith & Nephew
™All trademarks acknowledged
© Smith & Nephew October 2013
14-01873-SE

