



Vitrex® Steriheel Baby Sterile Cutting Safety lancet

För högt blodflöde med minimalt stickdjup

Användarsäkerhet - nålen är helt skyddad, både före och efter användning.

Aktiveringsknappen - är säkrad efter användning

Användarvänlig - förinställd, knappaktiverad design

Patientsäkerhet - För engångsbruk, steriliserad med gammastrålning . Kontrollerat stickdjup

Patientkomfort - extra vasst blad, höghastighetspenetration vilket ger minimal smärta samt snabb läkning

Högt blodflöde - Den kontrollerade rörelsen på bladet är designad för optimalt blodflöde

Användningsområden - Primärt på nyfödda och prematurer. Kan även användas där litet penetrationsdjup och/eller minimal påverkan av vävnaden är viktigt



Användning

1. Dra av säkerhetsstaven (Förhindrar oavsiktlig användning)
2. Referenspositioner för blodprovtagning på häl
3. Tryck lansetten lätt mot barnets häl och aktivera knappen
4. Samla blodprovet med ett kapillärrör
5. Släng lansetten i en lämplig säkerhetsbehållare

WARNING: Använd ej om skyddslocket har tagits av vid ett tidigare tillfälle eller om skyddsförpackningen har blivit skadad.

Förpackning:

Individuellt förpackade
 Avdelningsfp: 50 st
 Transportfp: 200 st

Teknisk specifikation

Färgkod	Specifikation	Artikelnr.	Användning
Rosa	1,14 mm djup/ 2,8 mm snittlängd	332113	Nyfödda
Gul	1,0 mm djup/ 2,5 mm snittlängd	333113	Nyfödda
Orange	0,85 mm djup/ 1,75 mm snittlängd	334113	Prematurer
Grön	0,65 mm djup/ 1,40 mm snittlängd	335113	Prematurer

Hållbarhet 5 år