

Vitrex® Sterilance Flex Sterile Safety lancet

Användarsäkerhet - nålen är helt skyddad, både före och efter användning

Patientkomfort - hög kvalitet, extra vass trefasad nål, höghastighetspenetration

Användarvänlig - justerbar design ger tre olika penetrationsdjup från en enda enhet - lätt att använda, förinstallerad och kontaktaktiverad enhet.

Patientsäkerhet - steril, engångs, kan ej återanvändas.

Kontaktaktiverad - ger ett fullgott blodprov varje gång

Användningsområden - Test av blodglukos och andra in-vitro diagnostiska tester


1



2



3

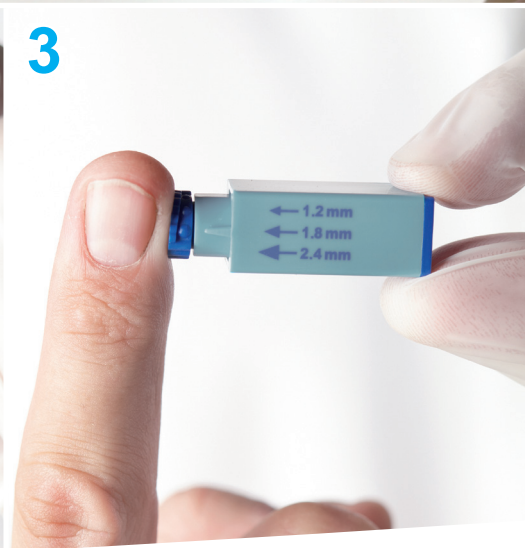

4



Användning

1. Vrid och dra försiktigt av skyddslocket

WARNING: Används ej om skyddslocket har tagits av vid ett tidigare tillfälle.

2. Ändra den justerbara spetsen till lämpligt stickdjup.

3. Välj punktionsyta och tryck lansetten mot ytan för att frigöra nålen.

4. Släng lansetten i en lämplig säkerhetsbehållare.

Förpackning:

Avdelningsfp: 100 st
Transportfp: 1000 st
Pallfp: 84000 st



Teknisk specifikation

Färgkod	Beskrivning	Stickdjup	Artikelnr.	Användning
Blå	26G 26G 26G	1.2 mm 1.8 mm 2.4 mm	399913	Mångsidig justerbar lansett med tre olika stickdjup
Röd	28 G 28 G 28 G	1.2 mm 1.8 mm 2.4 mm	399813	Mångsidig justerbar lansett med tre olika stickdjup

Hållbarhet: 3 år