

Katetrar för ileostomi och urostomi

från Wellspect HealthCare



Avsedda speciellt för patienter med kontinent ileostomi och urostomi

Avsedd användning

Katetrarna för ileostomi och urostomi är avsedda speciellt för patienter med kontinent ileostomi (ileostomi-reservoar, Kocks blåsa) och kontinent urostomi (ileal reservoar för urinavledning). Katetrarna kan användas för att tömma stomin, vid enstaka tillfällen eller intermittent, på sjukhus eller i hemmet.

Användning

Katetern är förpackad i en plastförpackning där katetern kan förvaras när den inte används. Innan katetern används skall den sköljas i vatten, vaselin eller gelé. Om katetern skall använ-

das igen skall den rengöras under rinnande vatten och förvaras i förpackningen.

Utformning

En rak kateter med två dränageögon. Toppen på katetern är rundad för att minska risken för trauma. Varje förpackning innehåller fem katetrar och ett kopplingsstycke som kan användas för att variera kateterlängden.

Förpackningar

Alla katetrar är packade i ren-rumsmiljö. 150 katetrar per transportförpackning. För storlek i avdelningsförpackning se nedan i produktöversikten.

Materialsammansättning

Kateter: Medicinsk plast-polyvinylklorid (PVC) med mjukgörare TEHTM (TOTM).


Avdelningsförpackning: Polyethylen (PE).

Transportförpackning: Wellpapp.


Sortiment

Referens	Benämning	Längd	Avd.	Transportförp.
68724	Urostomi kateter 24 FG	30 cm	25 (1x25)	6x25
68730	Ileostomi kateter 30 FG	30 cm	25 (1x25)	6x25


Användning av kopplingsstycket

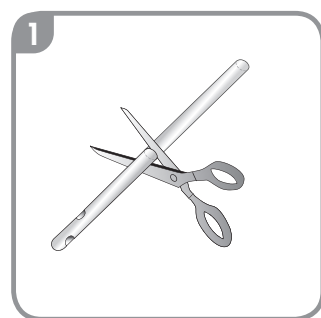

1. Klipp katetern i två delar.

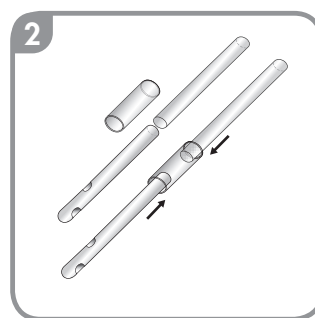

2. Sätt ihop katetrarna med kopplingsstycket enligt bilden och töm reservoaren.

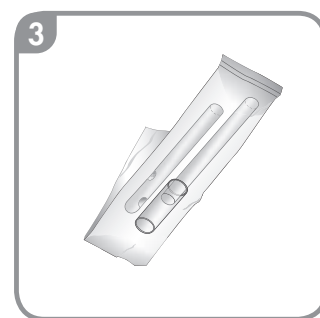

3. Efter tömning av reservoaren, ta bort kopplingsstycket och lägg tillbaka katetern i förpackningen.

Kontakta oss gärna för mer information.