




HUDSKYDD

Stomahesive ströpulver, -pasta, Orabase pasta

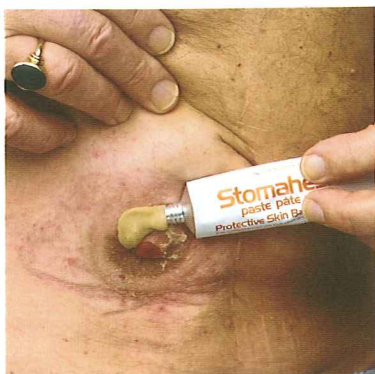

Stomahesive ströpulver används för att absorbera fukt från sårig hud. Stomahesive pasta används för att ge extra tätning när läckage från stomin är ett problem.

Absorberar fukt

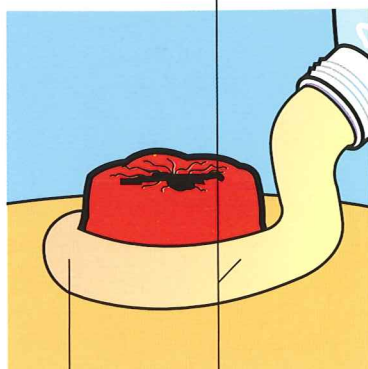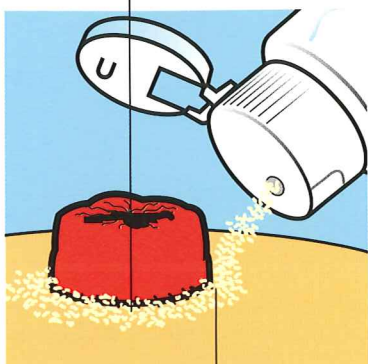

Ger effektiv tätning

Mycket hudvänliga ingredienser

Ströpulver och tätningspasta är bra och effektiva hjälpmedel när problem uppstår.



Stomahesive ströpulver, -pasta, Orabase pasta

Stomahesive ströpulver, -pasta och Orabase pasta innehåller bland annat gelatin och pektin.

Stomahesive pasta är ett effektivt hjälpmedel då läckage från stomin är ett problem. Pastan, som innehåller alkohol, ger när den torkar en god tätande effekt.

Stomahesive ströpulver absorberar effektivt fukt från sårig hud och är ett bra hjälpmedel då man skall fästa hudskyddsplattan på vätskande hud.

Orabase pasta används också som tätningspasta och som skydd på sårig och irriterad hud. Den innehåller olja och förblir mjuk efter applicering.

Fakta om Stomahesive ströpulver, -pasta, Orabase pasta

Stomahesive ströpulver kommer i en praktisk behållare som gör appliceringen enkel. Stomahesive pasta och Orabase pasta kommer i tuber. Ströpulver och pasta avlägsnas samtidigt med bandagebyte och ersätts med nytt vid behov.


Förvaring/hållbarhet/kvittblivning

Förvaras torrt i rumstemperatur. Undvik kyla och hög luftfuktighet. Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum. **Spola aldrig ner stomimaterial i toaletten!**


VARUNUMMER

Stomahesive ströpulver	Stomahesive pasta	Orabase pasta
Flaska à 25 gram	Tub à 60 gram	Tub à 100 gram
Vnr 251264	Vnr 261602	Vnr 251215


Så här använder du Stomahesive ströpulver, -pasta, Orabase pasta.

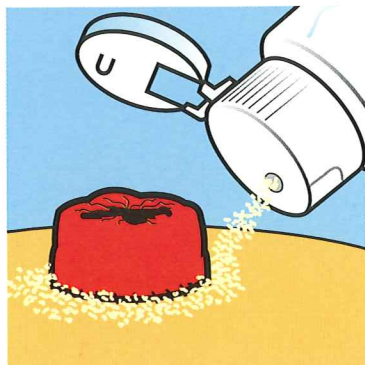


Huden skall vara väl rengjord innan Ströpulvret används. Ströpulvret strös i riklig mängd på den såriga huden.

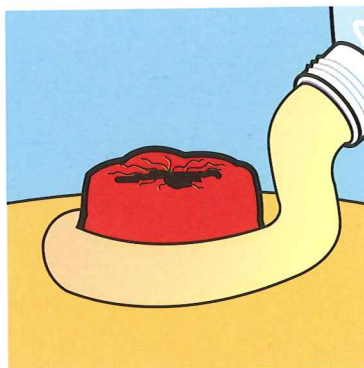


Stomahesive pastan spritsas runt stomin eller den ojämnhet som skall fyllas ut.

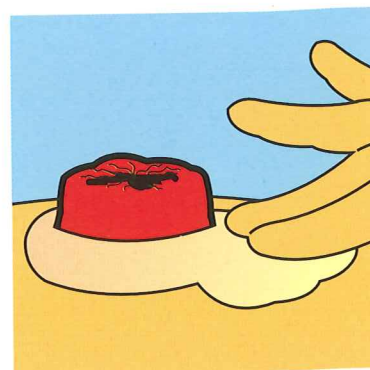


Stomahesive pastan formas med ett fuktigt finger. Detta för att pastan inte skall fastna på fingret.

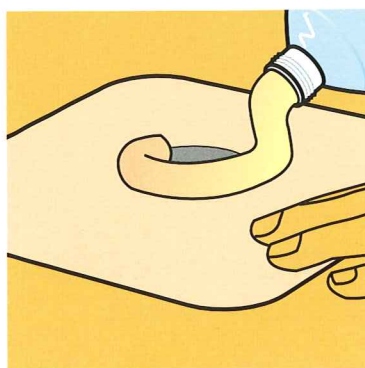

Man kan även spritsa på Stomahesive pastan direkt runt plattans hål.

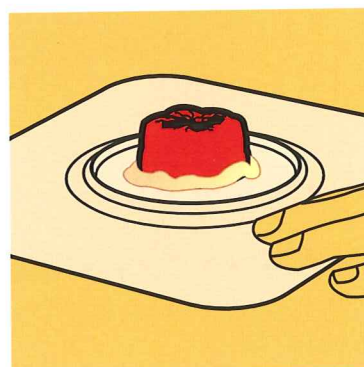

När hudskyddsplattan fästs på huden kan hålet i plattan vara någon millimeter större än stomin så att pastan kan tränga upp runt stomin.

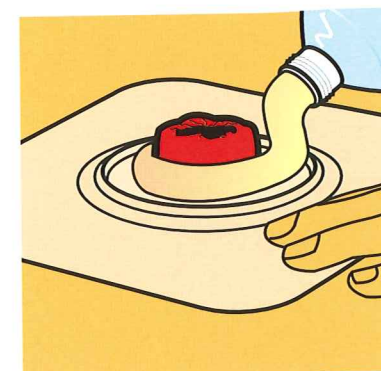

Orabase pasta är lämplig att använda vid tätning från ovasidan på plattan eller vid sårig hud.