

Moderat til kraftig væskende sår

ConvaTec tilbyr følgende produkter til behandling av moderat til kraftig væskende sår

AQUACEL® bandasje

Beskrivelse: AQUACEL® bandasje er den originale Hydrofiber®-bandasjen og teknologien er unik for ConvaTec. Hydrofiber®-bandasjen er fremtillt av 100 % cellulose (natriumkarboksymetylcellulose) og omdannes til en myk gel når den kommer i kontakt med sårveske, og opprettholder et fuktig sårmiljø som understøtter kroppens tilhelingprosess.

Den unike gelende virkningen av Hydrofiber® absorberer og binder sårveske, og stenger skadelige komponenter som finnes i sårvesken inne, slik som bakterier og proteiner, for å beskytte huden rundt såret.^{6,7}

Indikasjoner: AQUACEL® bandasje er indisert som primærbandasje for væskende sår.

- Kroniske sår: leggsår, trykksår, diabetessår
- Akutte sår: Donorsteder (hvor hudgrafts er tatt), hudavskrapninger, lacerasjoner, postoperative sår og delhudsbrannskader AQUACEL® bandasje kan brukes på infiserte sår under medisinsk veiledning i et egnet behandlingsopplegg, og på sår som krever autolytisk debridering.

Bruk: Plasser AQUACEL® bandasje direkte på såret med en overlapping på minst 1 cm til huden omkring.

AQUACEL® bandasje bør deretter tildekkes med en passende fuktighetsbevarende sekundærbandasje slik som DuoDERM® Ekstra Tynn bandasje, eller DuoDERM® Signal™ bandasje. Skift bandasje når det er klinisk indisert. Anbefalt maksimal bæretid er opp til 7 dager.



AQUACEL® Hydrofiber® bandasje

Størrelse	Pk.	Varenr.
5 x 5 cm	10 stk	815639
10 x 10 cm	5 stk	815621
10 x 10 cm	10 stk	815597
15 x 15 cm	5 stk	815530
4 x 10 cm	10 stk	901510
4 x 20 cm	10 stk	921327
4 x 30 cm	10 stk	913494

AQUACEL® sårfiller med forsterkende fibrer

Størrelse	Pk.	Varenr.
1 x 45 cm	5 stk	922858
2 x 45 cm	5 stk	815654

AQUACEL® Extra™ bandasje

Beskrivelse: AQUACEL® Extra™ Hydrofiber® bandasje består av natriumcarboxymetylcellulose og forsterkende fibre av cellulose. Denne smidige og høyabsorberende bandasjen danner en sammenhengende myk gel ved kontakt med sårsekret, og bevarer dermed et fuktig sårmiljø som fremmer sårtilhelingen. AQUACEL® Extra™ bandasje binder sårsekret, bakterier og enzymer⁵ slik at huden omkring såret beskyttes.⁶

Indikasjoner: AQUACEL® Extra™ bandasje kan brukes som primærbandasje til moderat til kraftig væskende sår hvor det er ønskelig med ekstra absorpsjon eller holdfasthet.

- Kroniske sår: bensår, trykksår, diabetes fotsår
- Akutte sår: Donorsteder for hudtransplantater, skrubbsår, lacerasjoner, postoperative sår og delhudsbrannskader.

Bruk: Plasser AQUACEL® Extra™ bandasje direkte på såret med en overlapping på minst 1 cm på huden omkring. AQUACEL® Extra™ bandasje bør deretter tildekkes med en passende fuktighetsbevarende sekundærbandasje, slik som AQUACEL® Foam bandasje, DuoDERM® Ekstra Tynn bandasje eller DuoDERM® Signal™ bandasje. Skift bandasje når det er klinisk indisert. Bandasjen kan sitte på plass i opp til 7 dager.

Den nye generasjonen AQUACEL® bandasjer - mer AQUACEL® materiale for økt absorpsjon samt unike, innsydde forsterkende tråder som øker holdfastheten.



AQUACEL® Extra™ bandasje

Størrelse	Pk.	Varenr.
5 x 5 cm	10 stk	904004
10 x 10 cm	10 stk	922984
15 x 15 cm	5 stk	915089