

## DuoDERM® Signal™ förband

Produktbeskrivning: DuoDERM® Signal™ förband är ett modernt, vidhäftande hydrokolloid förband med avfasad kant och en innovativ visuell bytesindikator. Indikatorn gör det lättare att fatta beslut om omläggning och är avsedd att minska risken för att förbandet byts i förtid. Det består av ConvaTecs unika hydrokolloida formula av natriumkarboxymetylcellulosa, gelatin, pektin och vidhäftande polymerer.

Förbandets avfasade kant och ovansida med lågfriktionsfilm minskar risken för att förbandet ska rulla sig eller lossna.

DuoDERM® Signal™ förband absorberar sårvätska och skapar en fuktig miljö som främjar läkning genom att bidra till autolytisk debridering, underlätta epitelcellernas rörelse och göra det lätt att ta bort förbandet utan att nybildad vävnad skadas.

Indikation: DuoDERM® Signal™ förband kan användas för behandling av lätt till måttligt vätskande sår.

- Kroniska (svårläkta) sår: trycksår, bensår
- Akuta sår: mindre brännskador, tagställen för hudtransplantat, övriga kirurgiska sår och traumatiska skador.

Applicering: Välj storlek på förbandet så ytan täcker såret med en marginal på minst 3 cm utanför sårkanten. Se till att huden runt såret är torr. Placera förbandet över såret och tryck det lätt på plats så att det sitter säkert.

DuoDERM® Signal™ förband finns i många olika storlekar och former, även för applicering på hälarna och i sakrum. Förbandet ska bytas när det är kliniskt indikerat, när sårvätskan har nått bytesindikatorn eller efter högst 7 dagar.



DuoDERM® Signal™ förband

Storlek      Förp.  
20 x 20 cm      5 st

Vnr  
205457