


TILLBEHÖR

ConvaCare våtservett med hudskyddsmedel ConvaCare våtservett med häftborttagningsmedel



ConvaCare våtservett med hudskyddsmedel innehåller ett ämne som lämnar en skyddande film mellan huden och stomiplattan. ConvaCare våtservett med häftborttagningsmedel används för att underlätta borttagandet av eventuella rester av film och tejp.

Effektivt hudskydd

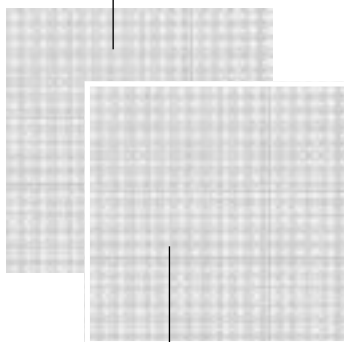

Tar bort rester av häftan

ConvaCare våtservetter finns med hudskyddsmedel alternativt häftborttagningsmedel.



ConvaCare våtservett med hudskyddsmedel ConvaCare våtservett med häftborttagningsmedel

ConvaCare med hudskyddsmedel används med fördel vid eventuella hudproblem. Innehållet i våtservetten skyddar huden vid besvär av t ex stripping, macerationer eller häftrester från plattor eller tejp. Vid svårigheter med att avlägsna häftrester från stomiplattor och tejper från huden används ConvaCare våtservett med häftborttagningsmedel.

Fakta om ConvaCare våtservett med hudskyddsmedel och ConvaCare våtservett med häftborttagningsmedel

ConvaCare våtservett med hudskyddsmedel är en kompress som innehåller ett icke vattenlösligt hudskydd. ConvaCare våtservett med häftborttagningsmedel är en kompress som innehåller ett lösningsmedel som effektivt tar bort häftrester. ConvaCare våtservetter är förpackade som engångsservetter i förpackningar om 100 st.

Förvaring/hållbarhet/kvittblivning

Våtservetterna förvaras i rumstemperatur. Bör ej lagras i starkt solljus. ConvaCare våtservetter skall ej öppnas i närheten av eld. Hållbarhet 3 år från tillverkningsdatum. Spola aldrig ner stomimaterial i toaletten.

VARUNUMMER

ConvaCare våtservett med hudskyddsmedel


Varunummer 247742
Antal per förp. 100 st.

ConvaCare våtservett med häftborttagningsmedel


Varunummer 247759
Antal per förp. 100 st.

Så här använder du ConvaCare våtservett med hudskyddsmedel och ConvaCare våtservett med häftborttagningsmedel

ConvaCare våtservett med hudskyddsmedel

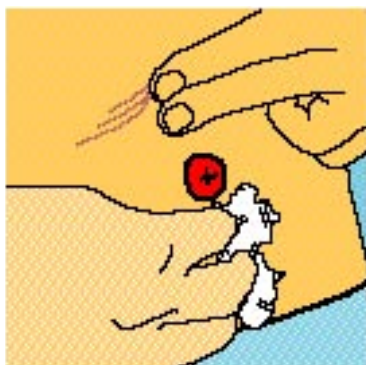

Rengör huden med ljummet vatten och torka ordentligt.

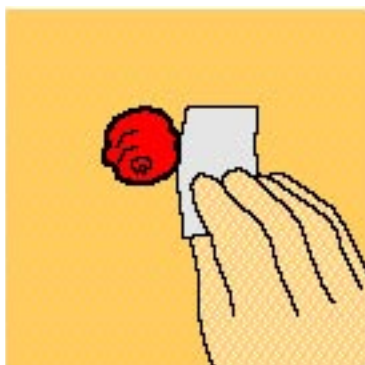


Öppna förpackningen och stryk på det område som behöver skyddas.




Låt lufttorka. (En tillfällig svidande känsla kan förekomma vid applicering på skadad hud).


ConvaCare våtservett med häftborttagningsmedel

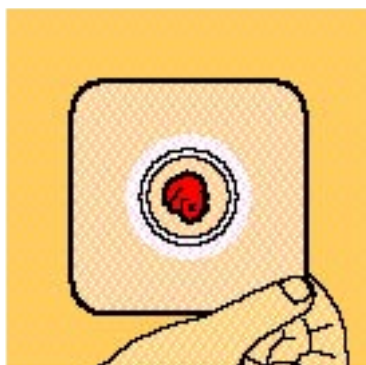

Öppna förpackningen och tag ut våtservetten. Lyft ett hörn av hud-skyddet eller tejpen.

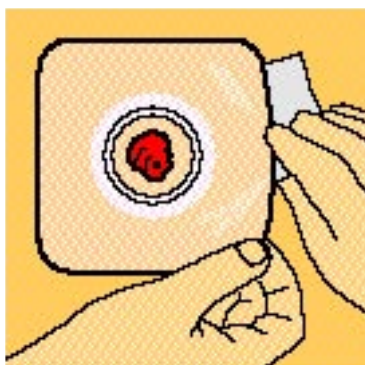

Torka med våtservetten mellan huden och häftan samtidigt som häftan försiktigt avlägsnas.

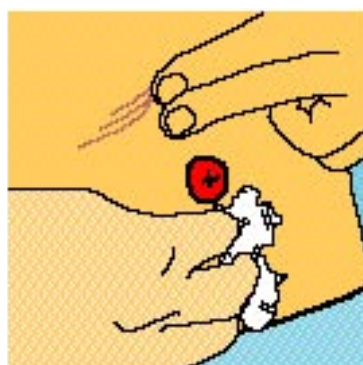

Avlägsna häftresterna med våtservetten, skölj och torka.