



SÅRBEHANDLING



DuoDERM® Hydroactive Bandage

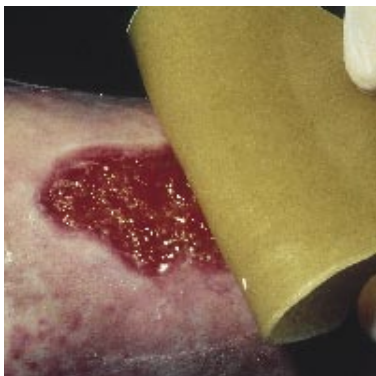

DuoDERM är ett smidigt bandage som passar speciellt bra för sår med normal sekretion. Patienten upplever ofta minskad smärta i såret med detta bandage.

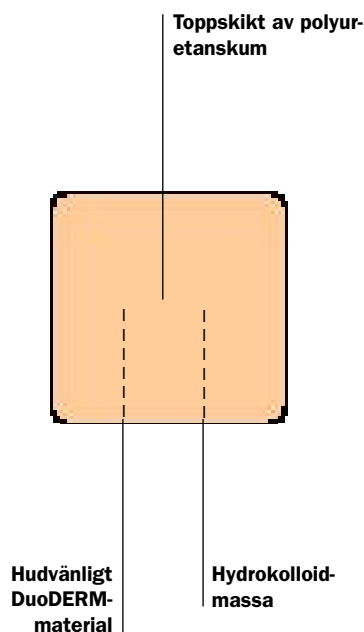

DuoDERM-materialet utgör en idealisk såråkningsmiljö och skyddar huden runt såret.

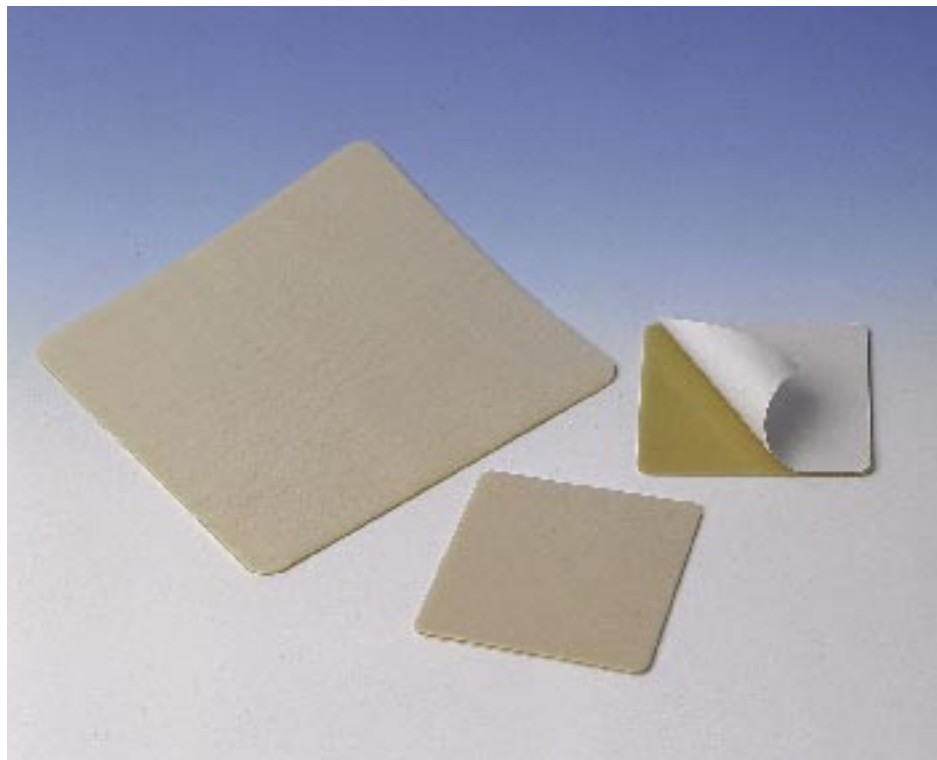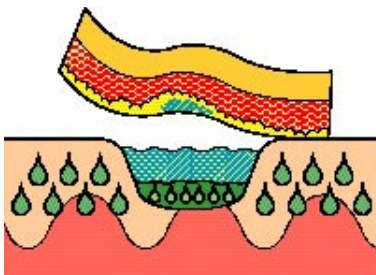

DuoDERM® Hydroactive Bandage

DuoDERM Hydroactive Bandage lämpar sig för bandagering av sårtypen med normal sekretion. Bandaget skapar en fuktig, biologisk miljö med ideala förhållanden för en snabb såråkning. DuoDERM Hydroactive Bandage har en diskret färg och plattan sitter kvar vid bad och dusch. På svårbandagerade ställen, som t ex fingrar eller sakrala trycksår, rekommenderas DuoDERM Extra Thin respektive DuoDERM E Border.

Fakta om DuoDERM Hydroactive Bandage

DuoDERM Hydroactive Bandage är en steril, självhäftande tvåskiktspatta som innehåller pektin, gelatin, natriumkarboxymetylcellulosa (CMC) och polyisobutylen. Ovansidan består av polyuretanskum. Plattan finns i flera storlekar, kan klippas till efter behov och bör täcka ca 3 cm av huden runt såret. DuoDERM Hydroactive Bandage bytes vid behov eller minst en gång per vecka.

Förvaring/hållbarhet


Förvaras torrt i rumstemperatur. Gammasteriliserad. Hållbarhet 5 år.

VARUNUMMER


DuoDERM Hydroactive Bandage

Storlek	Förpackning	Vnr
10 x 10 cm	5 st	263459
20 x 20 cm	3 st	263467


Så här använder du DuoDERM® Hydroactive Bandage

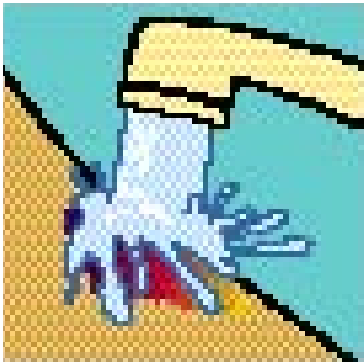


Tidigare anbringad DuoDERM-platta lossas först runt kanterna varefter den försiktigt rullas av huden. Såret sköljes skonsamt och lösa fragment avlägsnas. Om möjligt duscha såret eller använd sårspruta. Torka torrt runt såret.

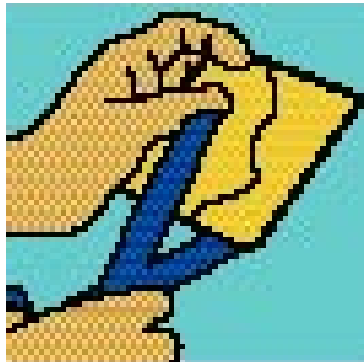


Typ av sårplatta väljes efter situationen. Eventuellt appliceras först DuoDERM Pasta eller DuoDERM Hydrogel. Se till att DuoDERM-plattan får fäste runt såret med 2-3 cm marginal. Klipp plattan till önskad storlek.

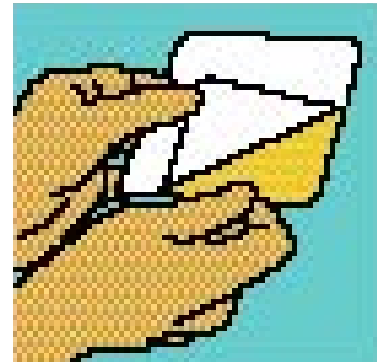


Ta bort skyddsfilmen. Undvik att vidröra undersidan av förbandet med fingrarna.

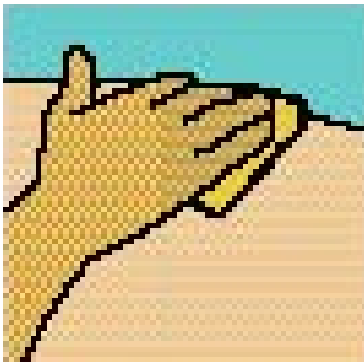

Applicera förbandet med en rullande rörelse. Jämna ut över såret. Värm med handen så att plattan får optimal fästförmåga.

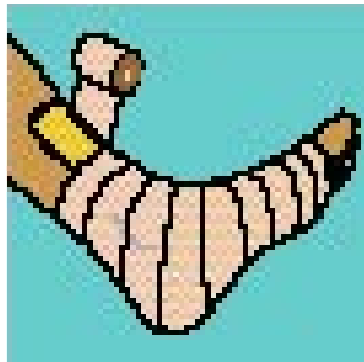

DuoDERM kan användas vid kompressionsbehandling eller vid samtidig tryckavlastning. När plattan blir utsatt för starkt tryck eller nötning skyddas kanterna genom tejning. DuoDERM E Border är ett lämpligt förband för trycksårsbehandling.

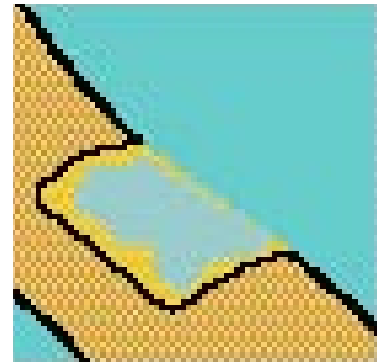

Beroende på sekretionen från såret kvarstår DuoDERM vanligen flera dagar. Byt förbandet innan läckage uppstår. Riskpatienter, t ex diabetiker med senkomplikationer skall kontrolleras ofta.