



SÅRBEHANDLING
INTENSIVE PLEIE
STOMIPLEIE
UROLOGI
OPERASJON
FIKSASJONER



Skånsom sårbehandling



DuoDERM® Mini bandasje er en sårbandasje som brukes til okklusiv, fuktighetsbevarende og effektiv sårbehandling av små sår med lite sekresjon. I kontakt med sårveske utvikles en gele som opprettholder et fuktig sårmiljø, hvilket stimulerer til autolytisk opprensing og sårtilheling.

DuoDERM® Mini bandasje består av en hydrokolloid kleber som inneholder gelatin, pektin og natriumcarboxymetylcellulose. Yttersiden er dekket av polyurethanfilm/-skum. DuoDERM® Mini har en ekstra klebekant, som er med på å sikre at den sitter godt. DuoDERM® Mini er vanntett, og kan brukes ved bad og dusj. Bandasjeskift gjøres ved behov, men minst en gang pr. uke. Varm gjerne platen med hendene før applisering på såret, og påse at huden er tørr for best mulig klebeevne.




ConvaTec



DuoDERM® bandasje er "originalen" blant de hydrokolloide bandasjene

DuoDERM® Mini bandasje gir en okklusiv, fuktighetsbevarende og effektiv sårbehandling for små sår med lite sekresjon. Okklusiv fuktighetsbevarende sårbehandling gir følgende dokumenterte fordeler:

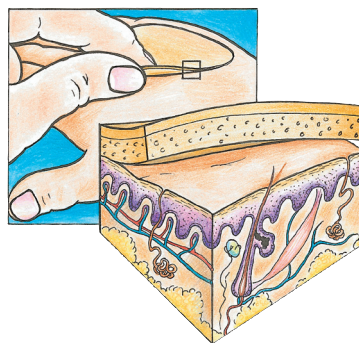

- Fremmer sårtilheling ⁽¹⁾
- Fremmer sårets opprensing ⁽¹⁾
- Understøtter granulasjon og celledeling ⁽¹⁾
- Lavere infeksjonsfrekvens sammenlignet med tradisjonell behandling ⁽²⁾
- Skader ikke, eller har annen negativ effekt på nydannet vev ⁽³⁾
- Skaper en bakterie- og virusbarriere ⁽⁴⁾

REFERANSER:

1. Jones VJ. The use of gauze: will it ever change? Int. Wounds J. 2006;3:79-86
2. Hutchinson JJ, McGuckin M. Occlusive dressings: A microbiological and clinical review. Am J Infect Control. 1990;18:257-268.
3. Friedman SJ, Su WPD. Management of leg ulcers with hydrocolloid occlusive dressing. Arch Dermatol. 1984;120:1329-1336.
4. Bowler PG, Delargy H, Prince D, Fondberg L. The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds. 1993;5:1-8.

DuoDERM® Mini bandasje

Størrelse	Pakning	ConvaTec Kode	Varenummer
5 x 5 cm	50 stk	37300	807248



FAKTA

DuoDERM® Mini bandasje

DuoDERM® Mini bandasje er en steril, selvklebende tosjiktsplate som inneholder pektin, gelatin og natriumcarboxymetylcellulose (CMC). Yttersiden er dekket med polyurethanfilm/-skum. DuoDERM® Mini bandasje har en ekstra klebekant, noe som sikrer god klebeevne.

INDIKASJONER

Bruk DuoDERM® Mini bandasje til små sår med lite sekresjon. Platen kan med fordel brukes på skrubbsår og brannså, og på områder som er vanskelig å bandasjere. Dette kan være hender, føtter, rygg og hofter. Andre indikasjoner kan være små kirurgiske operasjoner som laparoskopisk kirurgi eller biopsier.

SKIFTINTERVALL

Bandasjen kan sitte på i opp til 7 dager eller skiftes når den er mettet.

OPPBEVARING/HOLDBARHET

Oppbevares tørt i romtemperatur. Holdbarhet 5 år.

STERILISERINGSMETODE

Gammasterilisert.

KLASSIFISERING

DuoDERM® Mini bandasje er CE-merket og tilfredsstillende relevante miljø- og sikkerhetskrav.

For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegget.



ConvaTec

ConvaTec Norway AS
Postboks 6464 Etterstad, 0605 Oslo
Kundeservice: 800 30 995
convatec.kundeservice@convatec.com
www.convatec.no