



SÅRBEHANDLING
INTENSIVE PLEIE
STOMIPLEIE
UROLOGI
OPERASJON
FIKSASJONER

DuoDERM®

Skånsom sårbehandling



DuoDERM®
Standard bandasje



DuoDERM® E
bandasje




DuoDERM®
Pasta

DuoDERM® – den aller første hydrokolloide bandasjen – var banebrytende innen fuktig sårtilheling, og endret metodene for sårbehandling radikalt. I kontakt med sårsekret dannes en myk gel som vedlikeholder et fuktig sårmiljø og er gunstig for sårtilhelingen. DuoDERM®-platene har en diskret farge, og kan benyttes ved bad og dusj. Bandasjene kan klippes til egnet størrelse og fasong.



ConvaTec

DuoDERM® STANDARD BANDASJE

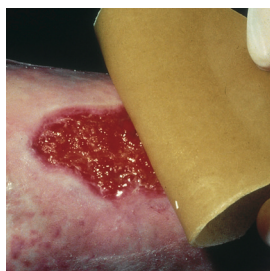

DuoDERM® Standard bandasje er en smidig bandasje som egner seg spesielt godt til lett til moderat væskende sår. DuoDERM®-materialet danner en myk gel ved kontakt med sårsekret og bevarer et fuktig sårtilhelingsmiljø som understøtter kroppens egne sårtilhelingsprosesser og bidrar til å beskytte huden rundt såret. DuoDERM® Standard bandasje fungerer som en bakterie- og virusbarriere¹ når bandasjen er intakt og uten at lekkasje forekommer. Varm gjerne platen med hendene før den appliseres over såret. Appliser deretter DuoDERM® bandasje med en marginal på 3 cm utenfor sårkantene. Pass på at huden er tørr slik at platen fester godt.

DuoDERM® Standard bandasje

Størrelse	Stk./Pk.	ConvaTec Kode	Varenummer
10 x 10 cm	5	H7610	853853
20 x 20 cm	3	H7620	853861

DuoDERM® E BANDASJE




DuoDERM® E bandasje er en smidig bandasje som egner seg spesielt godt til lett til moderat væskende sår. DuoDERM® E-materialet skaper et fuktig sårtilhelingsmiljø som understøtter kroppens egne sårtilhelingsprosess og bidrar til å beskytte huden rundt såret. DuoDERM® E fungerer som en bakterie- og virusbarriere¹ når bandasjen er intakt og uten at lekkasje forekommer. Varm gjerne platen med hendene før den appliseres over såret. Appliser deretter DuoDERM® E bandasje med en marginal på 3 cm utenfor sårkantene. Pass på at huden er tørr slik at platen fester godt.

DuoDERM® E

Størrelse	Stk./Pk.	ConvaTec Kode	Varenummer
10 x 10 cm	5	H7660	847954
15 x 20 cm	10	H7631	887539
20 x 20 cm	3	H7663	848465
20 x 30 cm	3	H7642	971242

DuoDERM® HYDROACTIVE® PASTA

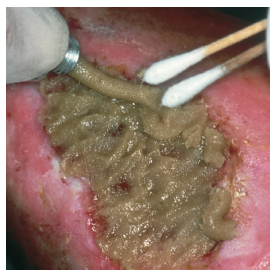

DuoDERM® Hydroactive Pasta er en myk og smidig pasta som benyttes sammen med DuoDERM bandasjer ved bandasjering av dype sår. Appliser DuoDERM® Pasta på såret eller i sårhulen, og jevn ut pastaen med en steril spatel eller finger med steril hanske.

DuoDERM® Hydroactive Pasta bevarer et fuktig sårmiljø, noe som understøtter kroppens egen sårtilhelingsprosess. DuoDERM® bandasje kan benyttes som dekkende bandasje.

DuoDERM® Hydroactive® Pasta

Størrelse	Stk./Pk.	ConvaTec Kode	Varenummer
Tube à 30 gram	1	H7930	882373

FAKTA

DuoDERM® STANDARD BANDASJE

DuoDERM® Standard er en steril, selvklebende plate med to sjikt som inneholder pektin, gelatin, natriumkarboxymetylcellulose (CMC) og polyisobutylene. Oversiden består av polyuretanskum. Platen finnes i to størrelser, kan klippes til etter behov og bør dekke ca. 3 cm av huden rundt såret. DuoDERM® Standard bandasje kan sitte på såret i opp til syv dager, eller skiftes når den er mettet.

DuoDERM® E

DuoDERM® E er en steril, selvklebende plate med to sjikt som består av pektin, gelatin, natriumkarboxymetylcellulose (CMC) og syntetiske elastomerer. Oversiden består av polyuretanskum. Bandasjen finnes i flere størrelser, kan klippes til etter behov og bør dekke ca. 3 cm av huden rundt såret. DuoDERM® E skiftes ved behov, eller minst en gang i uken.

DuoDERM® HYDROACTIVE PASTA

DuoDERM® Hydroactive Pasta består av DuoDERM®-materiale med bl.a. gelatin, pektin og natriumkarboxymetylcellulose oppløst i en mineralolje. Pastaen holder seg myk og smidig og blir gradvis mer tyntflytende etterhvert som den absorberer sårsekret. DuoDERM® Hydroactive Pasta er lett å skylle ut av såret med sterilt saltvann.

OPPBEVARING/ HOLDBARHET

Oppbevares tørt i romtemperatur. Holdbarhet 5 år.

STERILISERINGSMETODE

Gammasterilisert.

KLASSIFISERING

DuoDERM® Standard, E og Pasta er CE-merket og tilfredsstillende relevante miljø- og sikkerhetskrav.

For ytterligere informasjon, se bruksanvisningen i respektive pakning.



ConvaTec

1. Bowler PG, Delargy H, Prince D, Fondberg L. The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds 1993;5:1-8.