



"Man håper jo at hele bandasjen kan fjernes i ett stykke"

"Noen av pasientene mine har sår med kavitet, slik at jeg trenger en bandasje med god absorpsjonsevne. Jeg vet hvor vondt det kan være for pasienten å få fjernet bandasjen fra et kavitetsår. Jeg håper hver gang at det skal være enkelt, og at hele bandasjen skal følge med samtidig."

Sykepleier, plastikkirurgisk avdeling

Spesialbandasje for kavitetsår – enkel å fjerne i ett stykke

AQUACEL® sårfiller er designet for bruk i sårhuler. Bandasjen er lett å legge på¹, og de forsterkende fibrene gjør det enkelt å fjerne den i ett stykke. Det er til stor hjelp for personalet – og en lettelse for pasienten, da smertefulle sårskift kan reduseres². AQUACEL® sårfiller bevarer et fuktig sårhelingsmiljø³ og former seg etter såret, slik at det ikke oppstår hulrom hvor bakterier trives⁴.

AQUACEL® sårfiller absorberer sårvæske raskt og omdannes til en sammenhengende gel som binder sårvæsken³ inne i bandasjen.

AQUACEL® sårfiller er også tilgjengelig i varianter med sølv for sår som er infiserte eller for sår med risiko for infeksjon⁵. Bandasjene kan sitte på i inntil sju dager, noe som fremmer helingsprosessen³.

Indikasjoner: Sår med kavitet og åpne abscesser.

Spesialbandasje for dype sår

- **Ekstra strekkstyrke sikrer at bandasjen kan fjernes i ett stykke.**
- **Utformet som smale bånd for enkel bandasjering av kavitetsår.**
- **Tilgjengelig med sølv ved behov for antimikrobiell effekt.**
- **Optimalt sårhelingsmiljø – rask geldannelse³, absorpsjon av væske, bakterier og enzymer³, inflammasjonsdempende⁴**



AQUACEL®



AQUACEL® sårfiller

AQUACEL® sårfiller

Størrelse	Antall per eske	ConvaTec kode	Norsk varenr.
1 x 45 cm	5 stk.	420127	922858
2 x 45 cm	5 stk.	403770	815654

AQUACEL® Ag sårfiller

Størrelse	Antall per eske	ConvaTec kode	Norsk varenr.
1 x 45 cm	5 stk.	420128	914979
2 x 45 cm	5 stk.	403771	878949

Innhold: AQUACEL® og AQUACEL® Ag sårfiller består av unik Hydrofiber®-teknologi (natriumkarboksymetylcellulose) og forsterkende cellulosefibre. AQUACEL® Ag sårfiller inneholder dessuten 1,2 % (w/w) sølvioner.

Indikasjoner:* Den ekstra strekkstyrken i AQUACEL® og AQUACEL® Ag sårfiller innebærer at de med fordel kan brukes i behandlingen av sårkaviteter, åpne abscesser og operasjonssår. AQUACEL® Ag sårfiller velges ved behandling av sår som er infiserte eller som har økt risiko for infeksjon.

Skifteintervall: AQUACEL® og AQUACEL® Ag sårfiller kan sitte på i opptil sju dager – eller skiftes når det er klinisk indisert.

Oppbevaring: Ved romtemperatur.

Steriliseringmetode: Gammasterilisert.

Klassifisering: AQUACEL® og AQUACEL® Ag sårfiller er CE-merket og overholder gjeldende miljø- og sikkerhetskrav.

Holdbarhet: AQUACEL® sårfiller: Fem år.
AQUACEL® Ag sårfiller: To år.

Produkt og forpakning INNEHOLDER IKKE LATEKS.

* Se bruksanvisningen i forpakningen for mer informasjon.

Referanser:

1. Harding K. G. et al. Cost and Dressing Evaluation of Hydrofiber and Alginate Dressings in the Management of Community-Based Patients with Chronic Leg Ulceration. *Wounds* 2001; 13(6): 229-236.
2. Foster L, Moore P. The application of a cellulose-based fibre dressing in surgical wounds. *J Wound Care*. 1997; 6 468-473.
3. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. *Wounds UK*, 2010, Vol 6, No 2.
4. Hoekstra M. J. et al. A histological comparison of acute inflammatory responses with a hydrofibre or tulle gauze dressing. *Journal of Wound Care*, 2002, Vol 11, no 3.
5. Newman G. R. et al. Visualisation of bacterial sequestration and bactericidal activity within hydrating Hydrofiber® wound dressings. *Biomaterials* (27) 2006: 1129-1139.