



”Noen sår krever ekstra skånsom håndtering”

”Noen av sårene jeg behandler, er så følsomme at man nesten ikke får lov til å røre dem. I slike tilfeller bør det være enkelt å skifte bandasjen. Den bør helst kunne sitte på i tre-fire dager uten at det oppstår macerasjon. Den bør også kunne holde på sårvesken under trykk ettersom kompresjonsbehandling ofte er en del av sårbehandlingen.”

Sykepleier, plastikkirurgisk avdeling

AQUACEL® Foam bandasje

Myk og føyelig bandasje til skånsom sårbehandling

Skumbandasje til behandling av væskende overflatiske sår

- AQUACEL®-bandasjens sårhelende egenskaper direkte på såret
- Optimalt sårhelingsmiljø med dempet inflammasjon², rask geldannelse³ ved absorpsjon og retensjon av væske, bakterier og enzymer³
- Binder og holder på væske og bakterier - også ved kompresjon³
- Bevarer sårkantene intakte, forhindrer macerasjon³
- Enkel å bruke
- Skånsom silikonklebekant gjør bandasjen lett å fjerne¹
- Ekstra myk og føyelig



Indikasjoner: Trykksår, bensår, fotsår hos diabetikere, kirurgiske sår og sårskader.

AQUACEL® Foam bandasje finnes også i en versjon med sølv til behandling av infiserte sår eller sår med risiko for infeksjon.

AQUACEL®
Foam



AQUACEL® Foam bandasje

	Størrelse	Maks. sårstørrelse	Antall per eske	ConvaTec kode	Norsk varenr.
bandasje - uten kleber	5 x 5 cm		10 stk.	420631	876167
	10 x 10 cm		10 stk.	420633	817335
	15 x 15 cm		5 stk.	420635	839922
	20 x 20 cm		5 stk.	420636	953214
	15 x 20 cm		5 stk.	420637	851665
bandasje - med silikonkleber	8 x 8 cm	3 x 3 cm	10 stk.	420804	892003
	10 x 10 cm	5 x 5 cm	10 stk.	420680	904175
	12,5 x 12,5 cm	6,5 x 6,5 cm	10 stk.	420619	923100
	17,5 x 17,5 cm	11,5 x 11,5 cm	10 stk.	420621	915192
	21 x 21 cm	15 x 15 cm	5 stk.	420623	937618
	25 x 30 cm	19 x 24 cm	5 stk.	420624	899581
hælbandasje - med silikonkleber	19,8 x 14 cm	12 x 7 cm	5 stk.	420625	906490
sakralbandasje - med silikonkleber	20 x 16,9 cm	11,5 x 9,5 cm	5 stk.	420626	868564

Innhold: AQUACEL® Foam bandasjer er sterile sårbandasjer som består av et ytre polyuretansjikt, en absorberende pute av polyuretanskum og et sårkontaktsjikt av AQUACEL® (natriumkarboksymetylcellulose).

Indikasjoner:* AQUACEL® Foam bandasje kan brukes som primærbandasje eller dekkende bandasje i kombinasjon med AQUACEL®, AQUACEL® Extra, AQUACEL® Ag og AQUACEL® sårfiller i behandlingen av væskende sår.

- Kroniske (langsomt helende) sår: Bensår, trykksår, diabetiske fotsår.
- Akutte sår: Kirurgiske sår (primærhelende operasjonsnitt, sekundært helende sår og/eller donorsteder), delhudsbrannskader, sårskader (hudavskrapninger og rifter).

Skifteintervall: AQUACEL® Foam bandasje kan sitte på i inntil sju dager – eller skiftes når det er klinisk indisert.

Oppbevaring: Ved romtemperatur.

Steriliseringmetode: Gassterilisert med etylenoksid.

Klassifisering: AQUACEL® Foam bandasje er CE-merket og overholder gjeldende miljø- og sikkerhetskrav.

Holdbarhet: To år.

Produkt og forpakning INNEHOLDER IKKE LATEKS.

* Se bruksanvisningen i forpakningen for mer informasjon.

Referanser:

1. Harding K. G. et al. Cost and Dressing Evaluation of Hydrofiber and Alginate Dressings in the Management of Community-Based Patients with Chronic Leg Ulceration. *Wounds* 2001; 13(6): 229-236.
2. Hoekstra M. J. et al. A histological comparison of acute inflammatory responses with a hydrofibre or tulle gauze dressing. *Journal of Wound Care*, 2002, Vol 11, no 3.
3. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. *Wounds UK*, 2010, Vol 6, No 2.