

Avelle®

Negative pressure, positive power

**Två teknologier i kombination
kan ge enastående resultat**



**Upptäck vad negativt tryck tillsammans med
Hydrofiber®-teknologi kan åstadkomma**



ConvaTec

Det första systemet som kombinerar negativt tryck och Hydrofiber®-teknologi för behandling av sår

Sårbehandling med negativt tryck som ges med ett enkelt och diskret system utan behållare:

- Lätt att använda
- Liten och bärbar
- Tyst, inget alarm
- Pump för engångsbruk med 30 dagars användningstid.†



Lättavlästa indikatorlampor (inget alarm)

Hanteras med en knapp


Skonsam vidhäftande kant av silikon^{1*}

Flexibel användning

- Lämplig att använda inom och mellan olika typer av behandlingsenheter
- Separata förpackningar för pump och förband
- Ger patienterna möjlighet att återgå till ett normalt liv.

Unikt Hydrofiber® förband som är utformat för sårbehandling med negativt tryck utan behållare¹

- 1 Skonsam vidhäftande kant av silikon^{1*} som håller förbandet på plats.
- 2 Förbandets sårkontaktlager av Hydrofiber® med insydda förstärkande trådar bildar en sammanhängande gel i kontakt med sårvätskan och är konstruerat för att kunna avlägsnas i ett stycke.^{1*}
- 3 Förbandets kärna av Hydrofiber® bildar en gel i kontakt med sårvätskan och binder in både vätskan och de bakterier den innehåller.^{2, 3, 4*} Kärnan av Hydrofiber® innehåller kanaler som låter sårvätskan flytta sig inom förbandet så att den kan hållas kvar effektivt.^{1*}

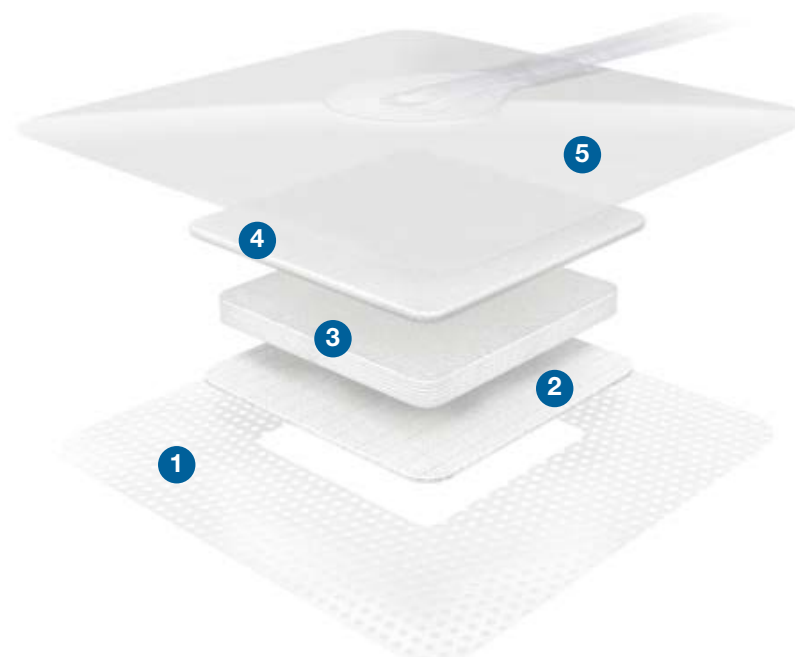

- 4 Skumskiktet fördelar det negativa trycket över förbandet.^{1*}
- 5 Filmskiktet utgör en barriär mot bakterier och virus, är duschsäkert och låter sårvätskan avdunsta för optimal vätskehantering.^{1*}

* Visat *in-vitro*.

† Batteribyte kan krävas under pumpens användningstid



Applicera

Applicera förbandet över såret. Se till att porten är uppåt (om möjligt) och ligger över oskadad hud. Undvik veck, placera om förbandet vid behov.



Täta

Applicera fixeringsremсор runt förbandet med 1 cm överlappning för effektiv tätning.



Anslut

Anslut pump, pumpslang och förbandsslang genom att vrida ihop kopplingarna.



Starta

Tryck på den blå knappen för att starta sårbehandlingen med negativt tryck.

Avelle® förband kan användas för många olika typer av sår

- Svårläkta sår
- Akuta sår
- Traumatiska sår
- Subakuta och rupturerade sår
- Hudtransplantat och andra tagställen
- Kirurgiskt slutna incisioner.

Se bruksanvisningen för en fullständig anvisning.

Beställ pump- och/eller förbandsförpackningar separat

Förbandsstorlek	Förpackningsstorlek	Absorptionsdynans storlek	Varunummer
16 cm x 16 cm	5	8 cm x 8 cm	421552
16 cm x 21 cm	5	8 cm x 13 cm	421553
12 cm x 21 cm	5	4 cm x 13 cm	421554
12 cm x 31 cm	5	4 cm x 23 cm	421555
Pumpenhet	1		421551

1. ASSESSMENT OF THE IN-VITRO PROPERTIES AVELLE® NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY DRESSING. WHRI4520 MS128. Data on File. 2015. ConvaTec.
2. Waring MJ, Parsons D, Physico-chemical characterisation of carboxymethylated spun cellulose fibres. Biomaterials. 2001;22:903-912. 3. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (AQUACEL®) and alginate dressings. Biomaterials. 2003;24(5):883-890. 4. HFM-2015/017. Data on File. 2015. ConvaTec Inc.

För mer information, ring: 020 - 21 22 22

www.convatec.se

Avelle är ett varumärke som tillhör ConvaTec Inc. ©2015 ConvaTec Inc. AP-015984-MM EM WCON723.

 **ConvaTec**

ConvaTec (Sweden) AB
Box 15 138,
167 15 Bromma
e-mail: convatec.kundservice@convatec.com