



neria™ guard infusjonssett

neria™ guard er et subkutant infusjonssett med en integrert innføringsadapter og myk kanyle, til enkel innsetting ved et trykk på en knapp. Nålen trekker seg tilbake etter innsetting, og dermed kan risikoen for stikkskader reduseres.

Produktspesifikasjoner

Kanylematerialet:	Myk plast	Teip:	Innebygd. Hudvennlig non-woven polyester med akrylatkleber
Innføringsvinkel:	90 grader (rett inn)	Kanylesikkerhet:	Ja. Kanylen ligger beskyttet i innføringshuset før og etter injeksjonen
Frakobling:	Ja, på innsettingsstedet	Innføringshus:	Ja. Innebygd i produktet
Innføringskanyle:	G27		
Diameter myk kanyle:	0,68 mm (~ G23)		


Myk kanyle (lengde)	Infusjonsslange (lengde)	Infusjonsslange (lengde og slangevolum)
6 mm	12 cm	12 cm ~ 0,04 ml
9 mm	30 cm	30 cm ~ 0,06 ml
	60 cm	60 cm ~ 0,10 ml
	110 cm	110 cm ~ 0,15 ml

neria™ guard infusjonssett tilbys i esker à 10 stk.
Kanyler og infusjonssett tilbys i esker à 10 stk.




neria™ guard


Brukerguide for infusjonssett:

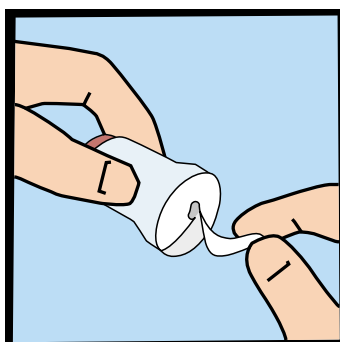


1.
Fjern forsiktig papiret på baksiden.

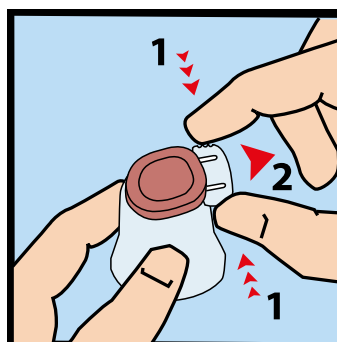


2.
Fjern beskyttelsesdekelet fra innføringshuset. Dette gjøres ved å klemme forsiktig på hver side av dekelet samtidig som det trekkes rett ut.

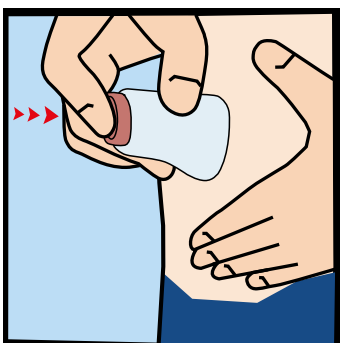


3.
Plasser innføringshuset på huden og trykk den røde aktiveringsknappen helt ned for å innføre infusjonskanylen.

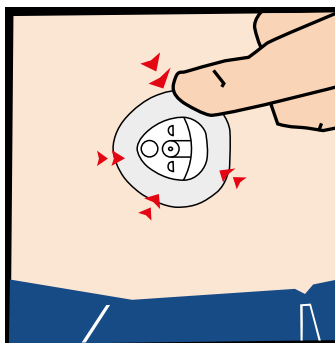

4.
Klem forsiktig rundt kanten på kleberen for å sikre at den sitter godt på huden

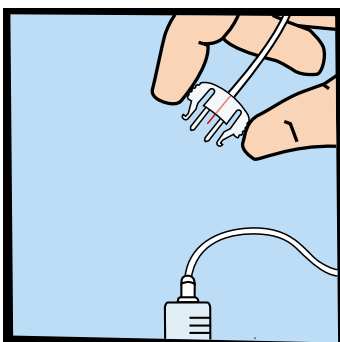

5.
Koble til pumpen og forbered (prime) slangen i henhold til bruksanvisning levert av produsent.

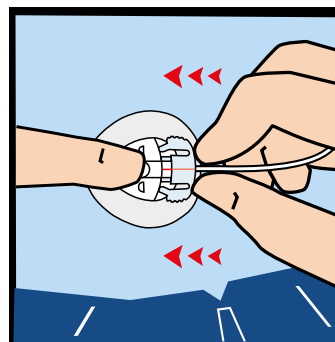

6.
Plasser en finger på kanylehuset og koble til slangen. Det høres et "klikk" når den sitter korrekt.

Vær oppmerksom på at denne brukerguiden kun illustrerer noen av de trinn som inngår når man skal anvende neria™ guard infusjonssett. Guiden er dermed ikke en erstatning for gjennomlesning av brukerveiledningen som følger med produktet.

neria is a trademark of Unomedical a/s © ConvaTec Inc. 2017 AP-016680-MM