



SÅRBEHANDLING
INTENSIVE PLEIE
STOMIPLEIE
UROLOGI
OPERASJON
FIKSASJONER

DuoDERM®
Hydrogel™

Skånsom sårbehandling




DuoDERM® Hydrogel™ er en vannbasert gel som i tillegg inneholder pektin, natriumcarboxymetylcellulose og propylenglykol. DuoDERM® Hydrogel bidrar til et gunstig sårtilhelingsmiljø gjennom sin evne til å absorbere sårveske og skape et fuktig sårmiljø.

Et fuktig sårtilhelingsmiljø understøtter kroppens naturlige mekanismer for opprensing av fibrin og nekrose – også kalt autolytisk debridering. DuoDERM® Hydrogel kan også brukes i behandlingen av infiserte* sår, og sår hos diabetikere. DuoDERM® Hydrogel er pakket i engangstuber med en praktisk sterilpakket applikator for lettere og mer presis dosering av gelen i såret.


** Som en del av den totale behandlingen av infiserte sår.*



ConvaTec

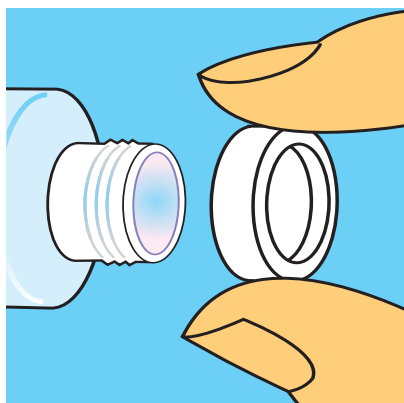

Skrú hetten av tuben. Fjern den hvite sikkerhetsringen.

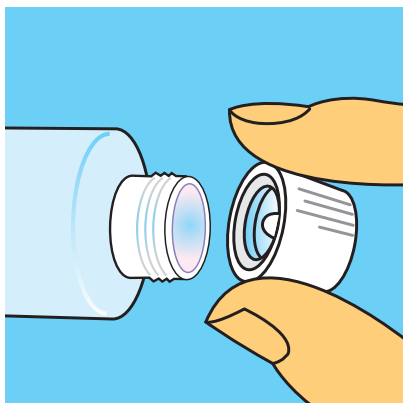

Skrú hetten på tuben igjen. Slik brytes sikkerhetsmembranen på tuben.

DuoDERM[®] er originalen blant de hydrokolloide bandasjene.

DuoDERM[®] Hydrogel[™] inneholder hydrokolloider, som ikke bare gir økt fuktighet men også har en absorberende effekt på sårsekret. DuoDERM[®] Hydrogel er effektiv, lett å bruke og komfortabel. Pasienten opplever ofte at gelen virker lindrende.

Påfør gelen direkte i såret. Fyll ikke såret mer enn til sårkanten. En optimal sårbehandling skapes ved å dekke såret med en fuktighetsbevarende bandasje, eksempelvis en DuoDERM[®] bandasje. Gelen kan lett skylles ut av såret.



FAKTA

DuoDERM[®] Hydrogel

DuoDERM[®] Hydrogel er en klar, tynt-flytende og steril gel, bestående av hydrokolloider (pektin og natriumcarboxymetylcellulose) og propylenglykol. Gelen danner et fuktig sårtilhelingsmiljø, som understøtter kroppens naturlige mekanismer for opprensning av fibrin og nekrose, også kalt autolytisk debridement.

INDIKASJONER

DuoDERM[®] Hydrogel er spesielt utviklet til behandling av tørre overflatiske og dype sår, som f.eks. bensår og trykksår. Kan også brukes ved behandling av infiserte sår*, eller sår hos diabetikere.

SKIFTINTERVALL

Anbefalt skiftintervall for DuoDERM[®] Hydrogel er maks. 3 dager ved behandling av fibrinbelagte, nekrotiske sår. Rene, granulerende sår kan behandles med opp til 7 dagers skiftintervall.

OPPBEVARING OG HOLDBARHET

Oppbevares ved romtemperatur. Unngå kulde. Holdbarhet er 3 år.

STERILISERINGSMETODE


Tuben er autoklavesterilisert. Applikator er sterilisert med etylenoxid.

KLASSIFISERING

DuoDERM[®] Hydrogel er CE-merket og oppfyller alle relevante miljø- og sikkerhetskrav.

For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegget.

* Som en del av den totale behandlingen av infiserte sår

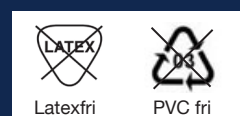

DuoDERM[®] Hydrogel

Størrelse
Tube à 15 gram

Pakning
10 stk.

ConvaTec
kode
401802

Varenr
807388



ConvaTec

ConvaTec Norway AS
Postboks 6464 Etterstad, 0605 Oslo
Kundeservice: 800 30 995
convatec.kundeservice@convatec.com
www.convatec.no