



SÅRBEHANDLING  
INTENSIVPLEIE  
STOMIPLEIE  
UROLOGI  
OPERASJON  
FIKSERING

# KALTOSTAT®

Bandasje med blodstillende effekt<sup>1</sup>




KALTOSTAT® er en alginat bandasje som kan brukes på middels til kraftig væskende sår. KALTOSTAT® påføres såret og dekkes med en fuktighetsbevarende bandasje, feks DuoDERM® Extra Thin bandasje eller DuoDERM® Signal™ bandasje. Bandasjen har en blodstillende effekt<sup>1</sup>, hvilket innebærer at det med fordel kan brukes på mindre og lettblødende sår. Bandasjen er enkel å bruke, myk og formbart og er komfortabel for pasienten.



**ConvaTec**

*Realise the possibilities™*

# KALTOSTAT®

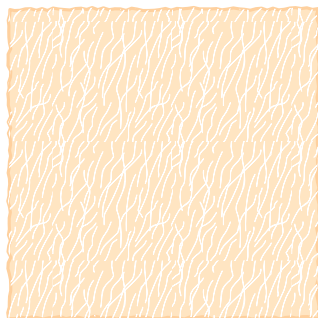

## NATURLIG SÅRHELING

80 % kalsiumalginat og 20 % natriumalginat.

## VARSONG SÅRHELING

Fibrene omdannes til en myk gele som gir et gunstig og helende miljø.

## BEVARER ET FUKTIG SÅRMILJØ


KALTOSTAT® bevarer et fuktig sårmiljø og er lett å fjerne. KALTOSTAT® finnes som kompresser i fire ulike størrelser og som vatt, noe som letter påføring av bandasjen.

## BEHAGELIG FOR PASIENTEN

KALTOSTAT® består av 80% kalsiumalginat og 20% natriumalginat og er et rent naturprodukt. Når KALTOSTAT®-materialet kommer i kontakt med sårsekret eller blod, omdannes alginatet til en myk gele. I denne prosessen absorberes store mengder væske.

## HAR EN BLODSTILLENDE EFFEKT<sup>1</sup>

I kontakt med blod har KALTOSTAT® en blodstillende effekt, hvilket innebærer at det med fordel kan brukes på mindre lettblødende sår eller områder der hud er fjernet.

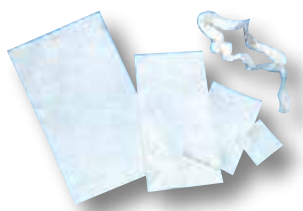

Referens: 1. R.H. Joy et al. A new calcium alginate haemostatic dressing. Dental Practice, February issue;16:1989.

## FAKTA

### KALTOSTAT®

Er en hvit, myk og steril non-woven bandasje bestående av kalsium-natrium alginatfibre. Alginatfibrene absorberer sårsekret og omdannes til en myk gele. Denne danner et fuktig sårhelingsmiljø. Enkel å fjerne.

### INDIKASJONER

KALTOSTAT® kan brukes på middels til kraftig væskende sår, feks trykksår, venøse og arterielle bensår, diabetessår, transplantasjonsområder, mindre brannskader, postoperative kirurgiske sår og traumer. Kan også brukes på infiserte sår under medisinsk tilsyn.

### INTERVALL BYTTE

Opp til 7 dager eller når bandasjen er mettet.

### OPPBEVARING

Tørt og i romtemperatur. unngå sterkt lys.

### STERILISERINGSMETODE

Gammasterilisert.

### KLASSIFISERING

Kaltostat® er CE-merket og tilfredsstillende relevante miljø- og sikkerhetskrav.

### HOLDBARHET

3 år.

For ytterligere informasjon se bruksanvisning i forpakningen.



**ConvaTec**

*Realise the possibilities™*

ConvaTec (Sweden) AB  
Box 15 138  
167 15 Bromma  
Sweden  
ConvaTec kundservice:  
Tel: 020-21 22 22  
Fax: 08-704 89 98  
E-mail: convatec.kundeservice@convatec.com  
www.convatec.com