




SÅRBEHANDLING
INTENSIV PLEIE
STOMIPLEIE
UROLOGI
OPERASJON
FIKSASJONER

CarboFlex®

Bandasjen som fjerner lukt

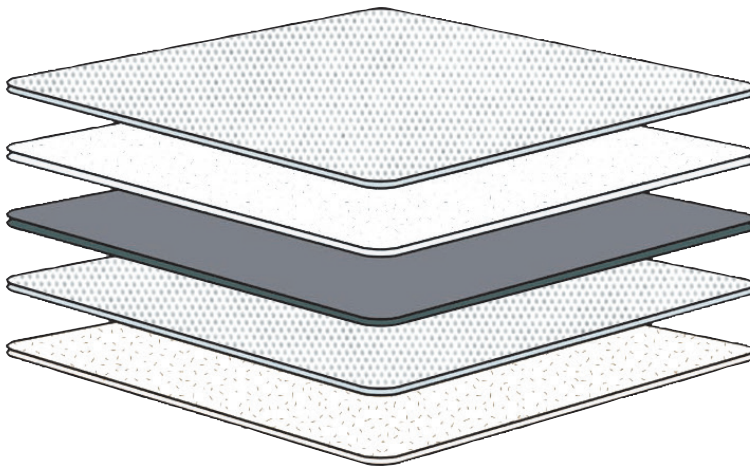


CarboFlex® bandasje er en lukt- og væskeabsorberende bandasje som kan benyttes til væskende, illeluktende sår. Absorpsjonflaten absorberer væske og bidrar til et fuktig sårmiljø. Kullfilteret i CarboFlex bandasje absorberer og reduserer lukt. Resultatet kan bli en lavere skiftfrekvens, kostnadseffektiv behandling og mindre ubehag for pasienten.



ConvaTec

CarboFlex®

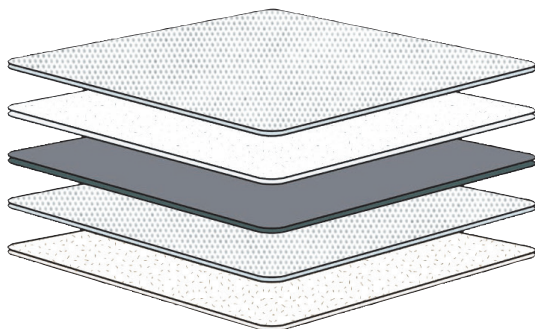

CarboFlex® bandasje bevarer et fuktig sårmiljø og er enkel å fjerne fra såret

Kullfilteret, som består av aktivt kull, absorberer lukt fra såret

Gunstig sårtilhelingsmiljø – absorpsjonsflaten (Hydrofiber® og alginat) danner en gel som vedlikeholder et fuktig sårmiljø

ABSORBERER LUKT OG SÅRSEKRET

CarboFlex® bandasje har en hurtig og god absorpsjonsevne og binder sårsekretet i bandasjen. Risikoen for macerasjon reduseres og antall bandasjeskift minimeres. CarboFlex® egner seg godt til væskende, illeluktende sår.

BEHAGELIG FOR PASIENTEN

CarboFlex® bandasje danner en gel i kontakt med sårsekret, og er derfor lett å fjerne fra såret uten å forårsake ubehag for pasienten.

ENKEL Å BRUKE

CarboFlex® bandasje legges direkte på såret, og bør dekke 3cm utenfor sårkantene. CarboFlex® kan benyttes både som primær- og sekundærbandasje. Ved dype sår kan sårhulen fylles med AQUACEL® Hydrofiber® bandasje. CarboFlex® kan benyttes i behandlingen av infiserte sår, under overoppsyn av helsefaglig personell. Ved behandling av infiserte sår, anbefales bruk av AQUACEL® Ag med ionisert sølv som primærbandasje.

FAKTA

CarboFlex® bandasje er en steril, ikke klebende bandasje med et absorberende sårkontaktsjikt (bestående av alginat og Hydrofiber®), et mellomsjikt av aktivt kull og en mykt og smidig dekkende overflate. Bandasjen brukes hel, og skal ikke klippes eller skjæres til. Legg den fibrøse overflaten mot såret. CarboFlex® skal ikke dekkes av en tett ytterbandasje.

INDIKASJONER

CarboFlex® bandasje kan benyttes til behandling av akutte og kroniske sår med ubehagelig lukt, f.eks. postoperative sår, donorflater, delhudsbrannskader, bensår, trykksår, cancersår og diabetessår. CarboFlex® kan benyttes på infiserte sår, evt. sammen med en antimikrobiell primærbandasje som f.eks. AQUACEL® Ag bandasje med ionisert sølv.

SKIFTEINTERVALL

Maksimalt tre dager, eller når bandasjen er mettet slik at lukten tiltar. Dersom såret er infisert bør CarboFlex® bandasje skiftes oftere.

OPPBEVARING

Oppbevares i rumtemperatur. Unngå sterkt lys, frost og høy luftfuktighet.

STERILISERINGSMETODE

Gammasterilisert


KLASSIFISERING

CarboFlex® er CE-merket (klasse IIb) og tilfredsstiller relevante miljø- og sikkerhetskrav.

HOLDBARHET

5 år.

For ytterligere informasjon, se bruksanvisningen i pakningsvedlegget.

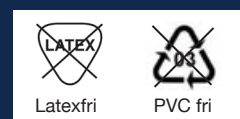

CarboFlex®

Størrelse	Stk./Pk.	ConvaTec kode	Varenummer
10 x 10 cm	10	403202	952226
8 x 15 cm (oval)	5	403203	952234
15 x 20 cm	5	403204	952242



ConvaTec

ConvaTec Norway AS
Postboks 6464 Etterstad, 0605 Oslo
Kundeservice: 800 30 995
convatec.kundeservice@convatec.com
www.convatec.no