


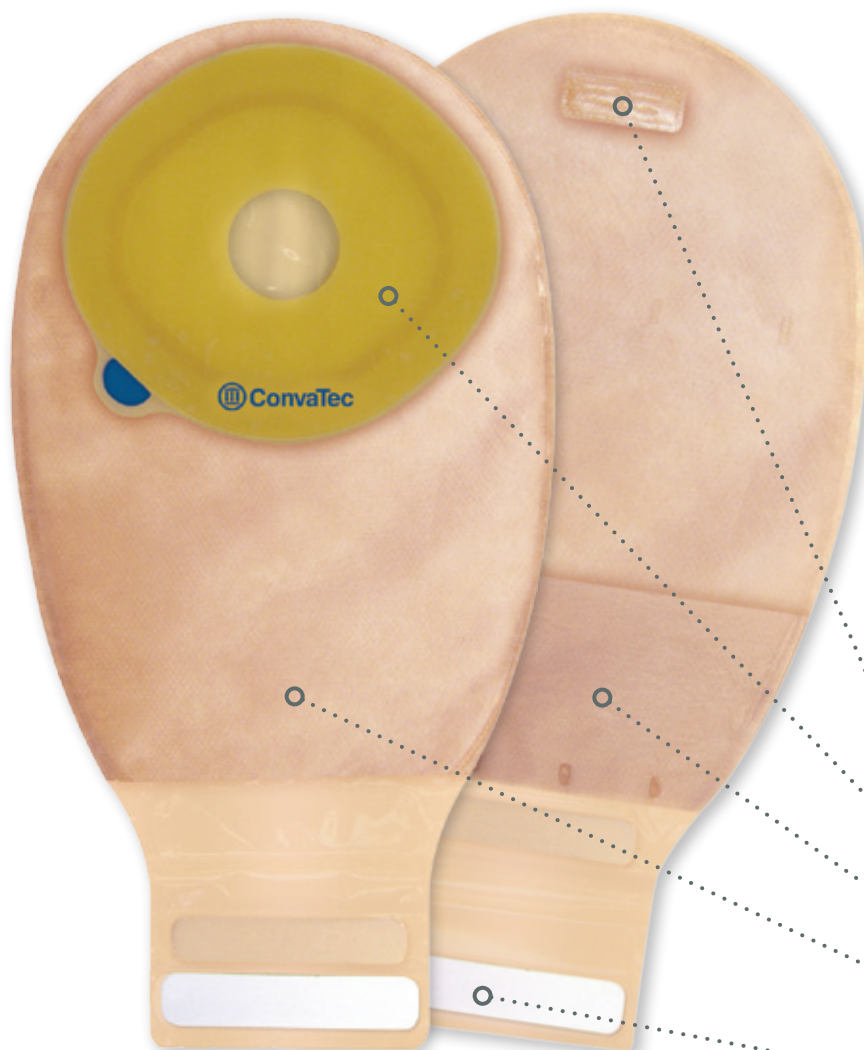

Esteem™

Stomiposer fra ConvaTec har flere unike egenskaper og holder den høyeste kvalitet når det gjelder *sikkerhet, funksjonalitet og komfort*. Akkurat som våre hudbeskyttelsesplater.

Høyeffektivt kullfilter

Hudbeskyttelse med Stomahesive® teknologi gir skånsomt og sikkert feste

Praktisk lomme som skjuler poselåsen

Mykt non-woven materiale som er vannavstøtende og hurtigtørkende

InvisiClose® integrert poselås for sikker lukking

Produktopplysninger

Stomahesive hudbeskyttelsesplate

- Stomahesive® har med stor suksess blitt brukt som hudbeskyttelse for stomiopererte i nesten 40 år. Materialet består av naturlige stoffer, blant annet pektin og gelatin, og gir et feste som er dokumentert skånsomt og sikkert. Pektinet bidrar også til den naturlige hudbeskyttelsen ved å senke pH-verdien på huden. Stomahesive® har evnen til å absorbere fukt fra huden uten å svekke festet. Materialets egenskaper gjør det mulig også å behandle irritert og sår hud.
- Esteem® en-delsbandasje bygger på Stomahesive®-teknologi. Festeevnen er tilpasset slik at bandasjen skal kunne skiftes ofte uten å påvirke huden.

Posemateriale

- Mykt og smidig fem-lags plastlaminat. Luft- og lukttett. Platen er mykgjort med soyabønneolje.
- Komfortmaterialet (non-woven) rundt posen gir en myk og sval overflate mot huden. Det er både vannavstøtende og hurtigtørkende.

Filter

- Høyeffektivt kullfilter som hurtig ventilerer ut gass og fjerner lukt. Innsiden har et ekstra lag plastfilm som forhindrer tilstopping eller lekkasje gjennom filteret. Ved bading/dusjing beskyttes filteret på utsiden av posen av en medfølgende filterbeskyttelse.

Integrert poselås med lomme

- Poselåsen InvisiClose® gir en sikker lukking. Låsen rulles sammen og kan legges inn i en lomme, og det gjør den tømbara posemodellen like liten og hendig som den lukkede.

Oppbevaring

- Stomibandasjer skal oppbevares tørt og i romtemperatur. Unngå kulde og høy luftfuktighet.

Holdbarhet

- Fem år fra produksjonsdato.

Klassifisering

- Produktet er CE-merket og oppfyller relevante miljø- og sikkerhetskrav.

Avfallshåndtering

- Følg lokale anvisninger. Ved bruk i hjemmet pakkes alt stomimateriell omhyggelig inn og kastes i restavfallet. Innholdet i posen kan etter behov først tømmes i toalettet.

Bruksanvisning


Påsetting av posen



1



2

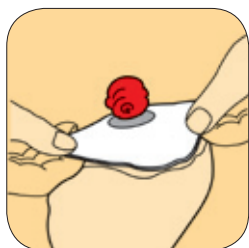

3

1. Rengjør huden rundt stomien med myke kompresser og lunkent vann. Skyll og tørk godt. Mål stomiens diameter og velg en passende Esteempose.

2. Oppklippbar pose: Tegn opp stomiens diameter på baksiden av platen og klipp opp hullet rett utenfor den tegnede linjen ved hjelp av en buet saks.


Ferdigstansede hull: Velg en pose med en åpning som passer til stomien.

3. Ta bort dekkpapiet fra hudbeskyttelsesplaten. Sentrer åpningen over stomien og trykk nedre del av hudbeskyttelsesplaten fast mot huden. Rull deretter resten av platen oppover. Masser hudbeskyttelsen fast i 30 sekunder. Vær ekstra nøye med området nærmest stomien.

Fjerning av posen



1

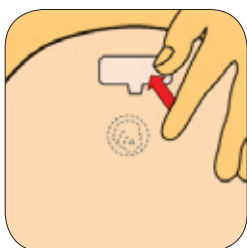


2


1. Når du skal fjerne bandasjen drar du forsiktig i hudbeskyttelsesplaten av huden samtidig som du trykker lett på huden med den andre hånden. Hvis hudbeskyttelsesplaten sitter godt fast kan du forsiktig løsne den med en fuktig kompress.

2. Ved bading og dusjing, dekk filteret med medfølgende filterbeskyttelse.


Lukking av posen

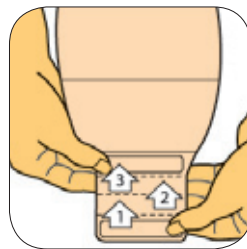

1

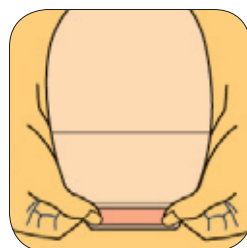

2

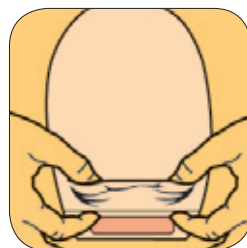


3

1. Lukk posen ved å brette posen nedenfra og opp inntil poselåsene møter hverandre.


2. Trykk poselåsene sammen langs hele bredden og press dem sammen inntil de låses fast.

3. Hvis ønskelig, vring lommen for å skjule poselåsen.

Tømming av posen.

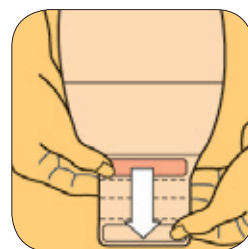

1

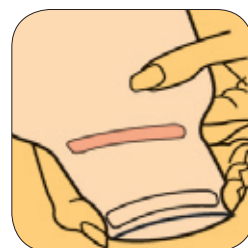

2

1. Når posen skal tømmes, åpne opp poselåsen

2. Åpne posen ved å klemme de hvite remsene sammen mellom tommel og pekefinger. Tøm posen.

Varenummer

Esteem

Type: Tømbar pose
Størrelse: Standard
Antall: 10 stk/pakke
Ferdigstanset hull

Hull størrelse i mm ConvaTec kode Norsk vare nr.

Beige

25	416725	804099
30	416729	931470
35	416733	954241
40	416737	853063

Esteem

Oppklippbar

Beige

20-70 416719 903775

Klar

20-70 416718 845380

▲ For ytterligere informasjon, se bruksanvisningen i pakningen.