

SWASH[®] BATHING WIPES - DUFTFRIE

ALLMENNINFORMASJON

Artikkelnummer	Ao4o28-8
Basic UDI-DI	871712793BODY.WASHM6
UDI-DI:	o8717127936854
Tiltenkt bruk	Tiltenkt på komplett kroppsvask av inkontinente og/eller sengeliggende pasienter som et smitteforebyggende tiltak.
Forpakkingsinnhold	8 kluter
Kassen inneholder	44 pakker
Produsent	Arion Manufacturing B.V. – Nederland Rutherford 11, 6422 RE Heerlen
Utstedelsesdato	o5/2021
Revisjonsdato	o8/2022
Versje	V2

PRODUKTINFORMASJON

Produkttype	Medisinsk enhetsklassifisering 1 (2017/745/EC)
Komposittkluter	Polyester og Lyocell
Klutens produksjonsmetode	Nåleperforering
Klutens tykkelse	ca. 110 GSM
Kassens vekt	ca. 4775 gram
Klutenes totale nettovekt ved avhending	ca. 35,2 gram
Total netto avhendingsvekt folie	ca. 5 gram
pH-verdi:	5 – 6
Klutdimensjon	20 cm x 20 cm
Forpakkingsdimensjon	10 cm x 26 cm


KREMINGREDIENSER

FORMÅL

		%
Vann	Løsemiddel som de andre ingrediensene er oppløst i.	75/-100
Propylenglykol	Vanntiltrengende ingrediens som reduserer dehydrering av huden. I tillegg er det et løsningsmiddel som bestemmer kremviskositeten.	1/-5
Glyserin	Vanntiltrengende ingrediens som reduserer dehydrering av huden. Også brukt som løsemiddel i mange kosmetiske produkter som sjampo.	1/-5
Caprilylglykol	Hudbalsam. Har dessuten konserverende egenskaper.	0,1/-1
Polysorbat 20	Emulgator. Binder kremen og stabiliserer emulsjonen.	0,1/-1
Dinatrium Kokoamfodioacetat	Mild rensende ingrediens med hudpleiende egenskaper.	0,1/-1
Tokoferol (vitamin E)	Konserveringsmiddel og fuktighetskrem for å forhindre uttørring av huden.	0,1/-1
Glycerylkaprylat	Fuktighetsbevarende. Har dessuten konserverende egenskaper.	0,1/-1

Kaliumsorbat	Naturlig konserveringsmiddel.	0,1/-1
Dipropylenglykol	Løsemiddel for konserveringssystemet.	0,1/-1
Natriumklorid	Tilsetningsstoff.	< 0.1

BRUKSVEILEDNING

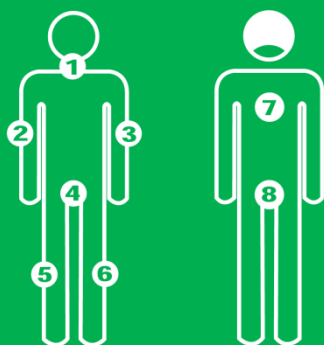

Bruk én klut for hver kroppsdel, som anvist nedenfor:

1. Ansikt, bryst og nakke
2. Høyre arm og armhule
3. Venstre arm og armhule
4. Nedre forreste kroppsflate
5. Høyre bein og fot
6. Venstre bein og fot
7. Ryggen
8. Nedre bakre kroppsflate

Om nødvendig, varm opp Swash®-pakken før bruk.

Kontrollér temperaturen på klutene i en oppvarmet pakke, før du bruker den.

Klutene er laget for engangsbruk, en pakke per person.

Rynket hud må klappes tørt med et håndkle for å forhindre fuktrelaterte hudlesjoner.

Kun egnet for ekstern bruk.

Sykepleier anbefales å bruke en pakke med Swash® innen 48 timer etter åpning.

Skal ikke skylles ned i toalettet.

TESTRESULTATER

Øyenirritasjonstest

Resultater viser at kremen ikke forårsaker irritasjon på hornhinnen og iris. I tillegg synes verken bindehinnen å svulme opp eller bli rød.

Hudirritasjonstest

Resultater viser at Swash® Bathing Wipes-krem ikke forårsaker hudirritasjoner.

Hudirritasjoner Det er ikke funnet tegn til ødem eller rød hud under og etter testen.