

SWASH® SHAMPOO CAP – PARFYMEFRI

GENERELL INFORMASJON

Artikkelnummer	Do4077-1
Basis UDI-DI	871712793HAIR.CARECB
UDI-DI	08717127937219
Tiltenkt bruk	Beregnet på en komplett hårvask av sengeliggende pasienter som infeksjonsforebyggende tiltak.
Pakkens innhold	1 deksel
Eskens innhold	52 pakker
Produsent	Arion Manufacturing B.V. – Nederland Rutherford 11, 6422 RE Heerlen
Utgivelsesdato	04/2021
Oppdateringsdato	08/2022
Versje	V2

PRODUKTINFORMASJON

Type produkt	Medisinsk enhetsklasse 1 (2017/745/EC)
Sammensetningsdeksel	Polyester og Lyocell
Produksjonsmetodeklut	Nålstanser
Eskens vekt	ca. 6823 gram
Netto avfallsvektdeksel	ca. 30 gram
Netto avfallsvekt folie	ca. 4 gram
pH-verdi	5 – 6
Dimensjoner deksel	30 cm x 30 cm
Pakkens dimensjoner	22 cm x 12 cm

INGREDIENSER KREM (INCI)

FORMÅL

KONSENTRASJON %

Aqua	Løsemiddel som de andre ingrediensene oppløses i.	75–100
Propylenglykol	Vanntiltrekkende ingrediens som reduserer uttørking av huden Utenom det, er det et løsemiddel og avgjør kremens viskositet.	1–5
Natriumlauroylsarkosinat	Overflateaktiv substans; rengjørende og skummende effekt fordi det senker overflatespenningen. Brukes også i mange spedbarnsprodukter.	0,1–1
Caprylylglykol	Hudkrem Har også konserverende egenskaper.	0,1–1
Kokamidopropylbetain	Gir sjampoens rensende og skummende egenskap.	0,1–1
Glycerylkaprylat	Fuktighetsbevarende middel. Har også konserverende egenskaper.	0,1–1
Kaliumsorbat	Naturlig konserveringsmiddel.	0,1–1
Dipropylenglykol	Løsemiddel for konserveringssystemet.	0,1–1
Tokoferol	Øker produktets holdbarhetstid ved å forhindre oksidering. Brukes også som fuktighetskrem.	<0,1
Natriumklorid	Tilsetning.	<0,1

BRUKSANVISNING



Varm opp Swash® Shampoo Cap i mikrobølgeovn i ca. 20 sekunder (800 Watt).

Test temperatur før bruk.

Trekk den oppvarmede hetten over pasientens hode og sørg for at den skal dekker pasientens hår helt

Masser håret gjennom Swash® Shampoo Cap i to til tre minutter til pasientens hår er mettet med løsningen.

Ta deretter av hetten. Det er ikke nødvendig å vaske av løsningen.

Pasientens hår kan tørkes og styles som vanlig.

Kun til engangsbruk Ikke varm opp på nytt.

Ikke skyll ned i WC.

TESTRESULTATER

Øyeirritasjonstest

Resultater viser at krem ikke fører til irritasjon av hornhinnen og iris. Konjunktiva blir heller ikke hoven og rød.

Hudirritasjonstest

Resultater viser at Swash® Shampoo Cap ikke irriterer huden. Det var ikke tegn til ødem eller rød hud under eller etter testen.