
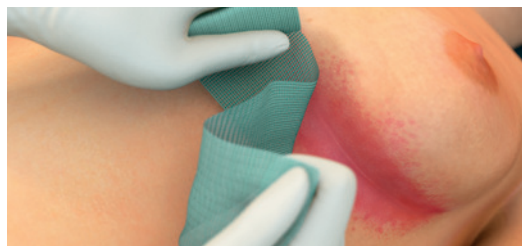


# SORBACT® RIBBON GAUZE

## BEHANDLING AV SVAMPINFEKTIONER I HUDVECK

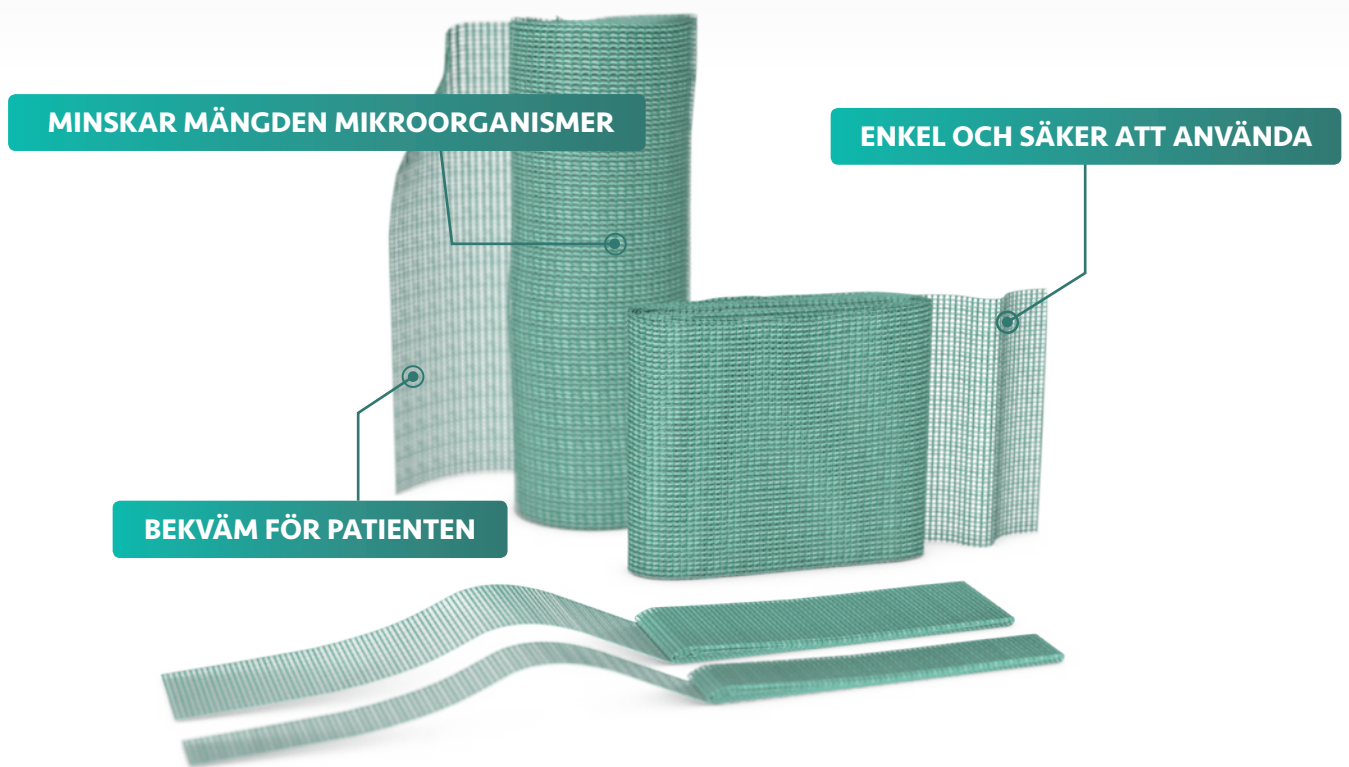

# FÖREBYGGER OCH BEHANDLAR SVAMPINFEKTIONER I HUDVECK

Sorbact® Ribbon Gauze är ett värdefullt behandlingsalternativ som är säkert, bekvämt och enkelt att använda vid behandling av infektioner i hudveck orsakade av svamp.<sup>1,6</sup> I motsats till svampdödande krämer och salvor för utvärtes bruk lämnar Sorbact® Ribbon Gauze inte kvar några feta och kladdiga rester.

## Utmaningen

Under ogynnsamma förhållande kan svampinfektion utvecklas i fuktiga hudveck såsom i bukveck, under bröst och mellan fingrar och tår. Vanliga symptom är rodnad, fjällande hud, klåda och blåsor<sup>2</sup>, även dålig lukt kan förekomma.

Risikfaktorer för utveckling av svampinfektioner i hudveck är antibiotikabehandling, fetma, tillstånd förknippade med nedsatt immunförsvar samt varma och fuktiga miljöer.

Den vanligaste behandlingsstrategin är svampdödande krämer och salvor för utvärtes bruk. De lämnar kvar feta och kladdiga rester på huden som kan orsaka irritation och andra biverkningar, dessutom finns det risk för resistensutveckling.<sup>3</sup>

## Vår lösning

Sorbact® Ribbon Gauze erbjuder en enkel och säker lösning för behandling av svampinfektion i hudveck. Inga krämer eller salvor behövs.

Sorbact® Ribbon Gauze behandlar svampinfektioner i hudveck genom att minska mängden mikroorganismer.

Inga mekanismer för bakteriell eller fungal resistens finns beskrivna med Sorbact®.

Eftersom inga aktiva ämnen frisätts till huden är det säkert att använda Sorbact® Ribbon Gauze även till nyfödda barn och gravida eller ammande kvinnor.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Enligt 97% av sjuk-sköterskorna i en multicenterstudie<sup>4</sup>




## SORBACT®-TEKNOLOGI

### Underlättar läkning

Förhöjda nivåer av mikroorganismer leder till infektionsrisk och fördröjd läkning. Sorbact® minskar mängden mikroorganismer på ett säkert sätt och förbättrar därmed förutsättningarna för läkning.

### Hur det fungerar


Mikroorganismer binder till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts. Sorbact® underlättar läkningsprocessen genom att minska mängden mikroorganismer utan att deponera några aktiva ämnen på huden.

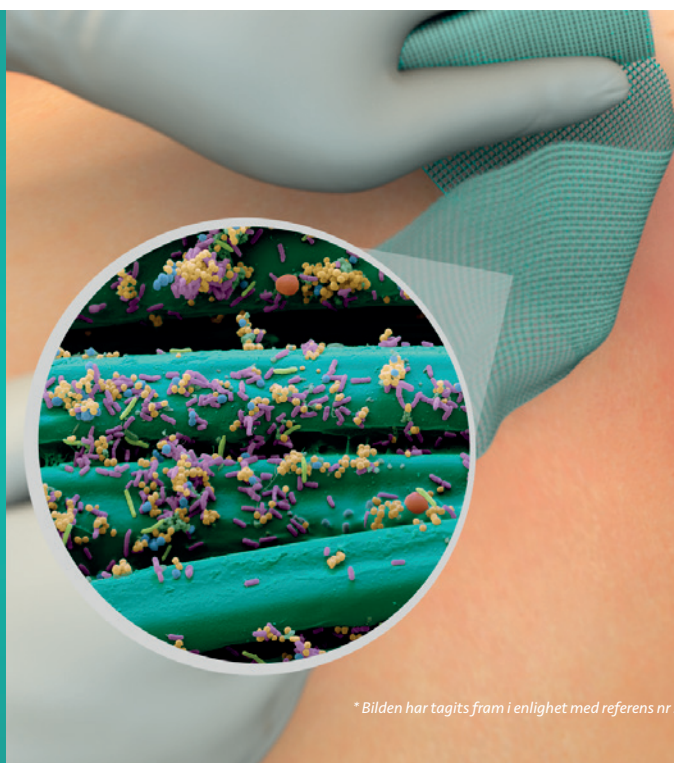

\* Bilden har tagits fram i enlighet med referens nr 5.


# KLINISK EVIDENS

Mer än 20 års klinisk erfarenhet har visat att Sorbact® Ribbon Gauze för behandling av svampinfektioner i hudveck är effektiv, väl tolererad och enkel att använda.<sup>3,6</sup>

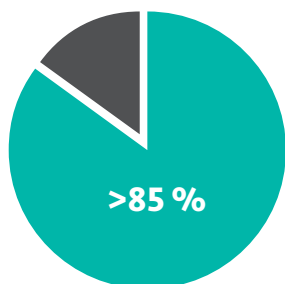

I en fallserie med patienter som led av svampinfektioner i hudveck under bröst och i ljumskar uppvisade mer än 85 % av patienterna läkning eller förbättring inom 3-10 dagar utan några biverkningar. I samtliga fall ansågs Sorbact® vara lätt eller mycket lätt att använda.<sup>6</sup>

N = 8

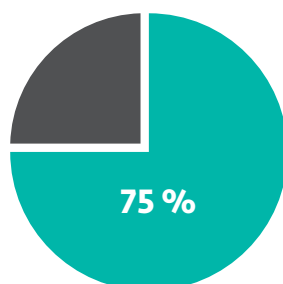

I en publicerad studie uppvisade 75 % av diabetiker med svampinfektioner mellan fingrarna läkning eller förbättring inom 10 dagar. Inga biverkningar registrerades.<sup>3</sup>

N=20


## FALLRAPPORT<sup>1</sup>

### Svampinfektion i hudveck hos en patient med diarré


En 81-årig man med en intertriginös svampinfektion med utbredning i analfåra, skrotum och lårens insida efter en tarminfektion som behandlats med vankomycin.

Frekvent lös avföring försvårar hanteringen av infektionen och ett försök att behandla med svampdödande kräm under två veckor för att häva infektionen misslyckades. Försämring och nedbrytning av huden ledde till betydande obehag för patienten och en annan behandlingsmetod behövdes.

Sorbact® Ribbon Gauze är ett svampbindande förband för behandling av svampinfektioner i hudveck. Användningen av Sorbact® ledde till en signifikant minskning av smärta och rodnad inom 24 timmar, var enkel att använda av vårdpersonalen samt smärtfri för patienten. Förbandet behövde bytas flera gånger per dag i början beroende på avföringsfrekvens. Det skedde en kontinuerlig förbättring under 20 dagar. Därefter drabbades patienten av en ny tarminfektion och diagnostiserades med typ 2-diabetes.

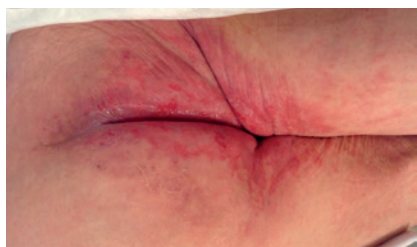

**DAG 0** Betydande obehag för patienten. Behandling med svampdödande kräm avslutades och behandling med Sorbact® Ribbon Gauze påbörjades.

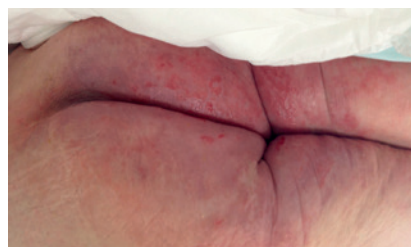

**DAG 2** Signifikant minskning av smärta och rodnad inom 24 timmar.

**Slutsats: Sorbact® Ribbon Gauze var effektiv för behandling av svampinfektionen, enkel att använda samt smärtfri för patienten.<sup>1</sup>**


## SORBACT® RIBBON GAUZE

# BRUKSANVISNING

1. Förbered det påverkade området i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Använd inte antimykotiska krämer eller salvor i kombination med förbandet.
3. Välj ett förband av lämplig storlek för att täcka det påverkade området.
4. Applicera förbandet, klipp det om det behövs. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med det påverkade området.
5. Om fixering behövs kan bh eller underkläder användas. Hudvänlig häfta rekommenderas om ytterligare fixering behövs. Häftan ska appliceras utanför det påverkade området.
6. Byt förbandet en gång om dagen i samband med inspektion.
7. Fortsätt att använda förbandet i 2-3 dagar efter att symtomen har försvunnit för att undvika återfall.

**Obs!** Se till att förbandet kommer i direktkontakt med det infekterade området eftersom svamp binder till förbandets yta. Kombinera inte Sorbact® med svampdödande medel för utvärtes bruk (krämer, salvor eller liknande) eller oljebaserade produkter eftersom de kan inverka negativt på behandlingsresultatet.

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

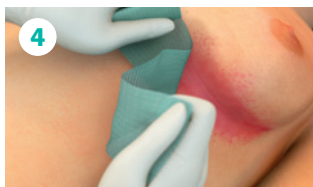

## PRODUKTSTORLEKAR

Produkt	Ref. nr	Storlek	st/förpackning
Sorbact® Ribbon Gauze	98118	1 x 50 cm	20
Sorbact® Ribbon Gauze	98121	2 x 50 cm	20
Sorbact® Ribbon Gauze	98120	5 x 200 cm	10
Sorbact® Ribbon Gauze	98119	10 x 200 cm	10

### Litteraturreferenser

1. Case report by Caroline Utzon Schøtt, specialist wound care nurse, Glostrup Hospital, Denmark. 2. Martinez-Ross NM, et al. Mycopathologia 2008; 166: 369-83. 3. Johansson A, et al. Wound Care 2009; 18: 470-3. 4. Kammerlander G, et al. Wounds UK 2008; 4: 10-18. 5. Ljungh Å, et al. Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria. J Wound Care 2006; 15(4):175-180. 6. Data on file. ABIGO Medical AB.

Sorbact® är en svensk innovation och sortimentet av förband säljs via ABIGO partners och återförsäljare i över 65 länder runtom i världen. I vissa regioner säljs Sorbact® som Cutimed® Sorbact® och Leukomed® Sorbact®. Hitta din lokala återförsäljare på [abigo.com](http://abigo.com). Sorbact® är ett registrerat varumärke som ägs av ABIGO Medical AB.

