


Sorbact® Gel Compress

Bakterie- og soppbindende sårbandasje med hydrogel

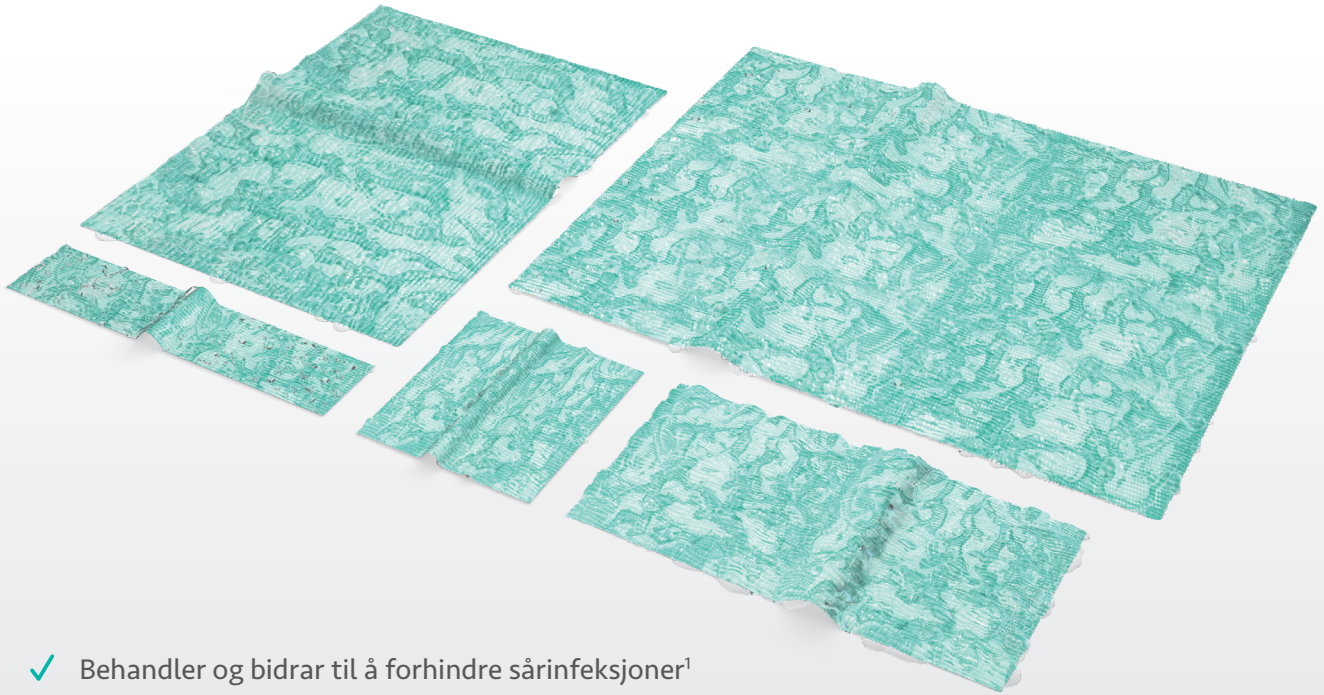

- ✓ Behandler og bidrar til å forhindre sårinfeksjoner¹
- ✓ Fjerner bakterier, sopp og endotoksiner trygt²
- ✓ Fremmer autolytisk debridering³
- ✓ Frigjør fuktighet til såret og bidrar til et fuktig sårmiljø⁴

Reduserer den mikrobielle belastningen i tørre til væskende sår

Sorbact® Gel Compress er en ikke-absorberende, bakterie- og soppbindende bandasje, basert på Sorbact® Technology. Den består av et Sorbact® DACC™-impregnert sårkontaktlag med hydrogel som inneholder karbomer og propylenglykol (10%). Sorbact® Gel Compress frigjør fuktighet og bidrar til et fuktig sårmiljø⁴ og letter autolytisk debridering³. Sorbact® Gel Compress behandler og bidrar til å forhindre sårinfeksjoner¹ og letter sårhelingsprosessen.

Kraftfull og sikker håndtering av sårinfeksjoner

Sorbact® Technology forebygger og behandler effektivt sårinfeksjon hos pasienter i alle aldre. Bakterier binder seg irreversibelt til den DACC™-impregnerte overflaten for sikker fjerning og en antibakteriell effekt uten frigjøring av aktive midler. Antimikrobiell resistens forventes derfor ikke. Sorbact® Technology-bandasjer gir sikker og effektiv sårinfeksjonsbehandling for å fremme pasientens velvære.

Bruksområde

Sorbact® Gel Compress er beregnet for bruk til rene, kontaminerte, koloniserte eller infiserte tørre sår til sår med sekresjon, som f.eks. kirurgiske sår, traumesår, brannsår, trykksår, diabetiske fotsår og leggsår. Sorbact® Gel Compress kan brukes på både overflatiske og dype sår. For å håndtere ekssudat bør Sorbact® Gel Compress brukes sammen med en fuktighetsbevarende sekundær bandasje som passer for mengden ekssudat.


Brukerveiledning

1. Klargjør såret og huden rundt i samsvar med lokal klinisk praksis.
2. Velg en passende bandasjestørrelse.
3. Fjern bandasjen fra emballasjen ved hjelp av aseptisk teknikk.
4. Bruk aseptisk teknikk hvis bandasjen skal klippes til.
5. Legg på bandasjen. Pass på at bandasjen kommer i direkte kontakt med hele såroverflaten, slik

at mikroorganismer kan bindes til bandasjen. Bandasjen skal ikke overlappe den omkringliggende huden. Unngå at bandasjen pakkes tett når den brukes på dype sår.

6. Fest med en fuktighetsbevarende sekundærbandasje som kan håndtere mengden sårsekresjon. F.eks. skumbandasje, absorberende bandasje eller filmbandasje, og fest bandasjen.
7. Hvor ofte bandasjen bør skiftes, avhenger av mengden sårsekresjon, sårets generelle tilstand og den omkringliggende huden. Hvis den kliniske tilstanden tillater det, kan bandasjen sitte på i inntil 7 dager. Hvis bandasjen fester seg til såret, kan den fuktes for å gjøre det enklere å fjerne den og unngå å forstyrre sårtilhelingen.


Sorbact® Gel Compress kan brukes i forbindelse med kompresjonsbehandling. Sorbact® Gel Compress er MR-sikker. Fjern Sorbact® Gel Compress før strålebehandling. Ny bandasje legges på etter behandlingen.

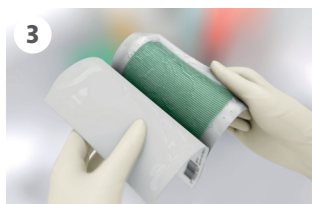

For detaljert produktinformasjon, kontraindikasjoner, forholdsregler og advarsler, les gjeldende bruksanvisning (IFU) før bruk.

Sorbact® Gel Compress

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke.
98136	7.5 x 7.5 cm	10
98139	3 x 15 cm	10
98137	7.5 x 15 cm	10
98180	15 x 20 cm	5
98181	20 x 25 cm	5

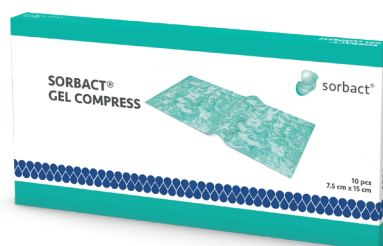

1. Ciprandi G et al. Meeting the challenges in pediatric wound care: Our 15-year experience with dialkylcarbamoyl chloride-coated dressing technology in acute and chronic wounds. *Chronic Wound Care Management and Research*. 2022;9:23-33. 2. Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. *Wounds UK*. 2008;4:10-18. 3. Stephen-Haynes J et al. Cutimed® Siltec foam and Cutimed® Sorbact® gel dressings: a clinical audit. *Wounds UK*. 2010;6:130-136. 4. Husmark J & Arvidsson A. Evaluation of moisture donating capacity of six different wound gels in vitro. *EWMA*. June 5-7, 2019, Gothenburg, Sweden (PP019).

Les mer på sorbact.no

Sorbact® Technology-bandasjer hjelper pasienter i mer enn 65 land gjennom våre varemerker Sorbact®, Cutimed® Sorbact®, Cutimed® Siltec® Sorbact®, Cutimed® Sorbion® Sorbact® og Leukoplast® Leukomed® Sorbact®.