

Sorbact® Surgical Dressing

Bakterie- og soppbindende bandasje

- ✓ Reduserer risikoen for postoperativ sårinfeksjon betydelig¹
- ✓ Forebygger og behandler sårinfeksjoner^{1,2}
- ✓ Fjerner bakterier, sopp og endotoksiner på en trygg måte²
- ✓ Effektiv mot de vanligste resistente patogene mikrobene³
- ✓ Kostnadseffektiv⁴
- ✓ Dusjtett baksidefilm



Reduserer den mikrobielle belastning i tørre til lite væskende sår

Sorbact® Surgical Dressing er en sårbandasje som binder bakterier og sopp, basert på Sorbact® Technology. Den består av et Sorbact® DACC™-belagt sårkontaktlag plassert på en absorberende pute og en gjennomsiktig baksidefilm med akrylkleber. Den dusjtette baksidefilmen beskytter mot kontaminering utenfra og lar overflødig væske fordampe. Sorbact® Surgical Dressing behandler og bidrar til å forebygge sårinfeksjoner¹, og letter sårtilhelingsprosessen.



Kraftfull og sikker håndtering av sårinfeksjoner

Sorbact® Technology forebygger og behandler effektivt sårinfeksjon hos pasienter i alle aldre. Bakterier binder seg irreversibelt til den DACC™-impregnerte overflaten for sikker fjerning og en antibakteriell effekt uten frigjøring av aktive midler. Antimikrobiell resistens forventes derfor ikke. Sorbact® Technology-bandasjer gir sikker og effektiv sårinfeksjonsbehandling for å fremme pasientens velvære.

Bruksområde


Sorbact® Surgical Dressing er beregnet på bruk ved behandling av rene, kontaminerte, koloniserte eller infiserte tørre til lite væskende sår, f.eks. kirurgiske sår og traumatiske sår.

Brukerveiledning


1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis. Kontrollér, at huden omkring såret er ren og tør.
2. Velg en passende bandasjestørrelse for såret. Ikke klipp i bandasjen.
3. Fjern bandasjen fra emballasjen ved hjelp av aseptisk teknikk.
4. Fjern de klebende beskyttende mellomleggene merket (1) fra sårkontaktsiden av bandasjen og påfør bandasjen over såret. Kontroller at Sorbact®-sårkontaktlaget kommer i direkte kontakt med hele såroverflaten.
5. Trykk kantene av bandasjen mot den omkringliggende huden, og fjern stabiliseringsfilmen merket (2) på toppen. Start med den grønne fliken.

6. Hvor ofte bandasjen bør skiftes, avhenger av mengden sårsekresjon, sårets generelle tilstand og den omkringliggende huden.
7. Bandasjen fjernes enklest ved å trekke og strekke i bandasjefilmen som ligger parallelt med huden. Hvis bandasjen fester seg til såret, kan den fuktes for å gjøre det enklere å fjerne den og unngå å forstyrre sårtilhelingen.

Sorbact® Surgical Dressing er MR-sikker. Fjern Sorbact® Surgical Dressing før strålebehandling. Etter behandlingen påsettes en ny bandasje.

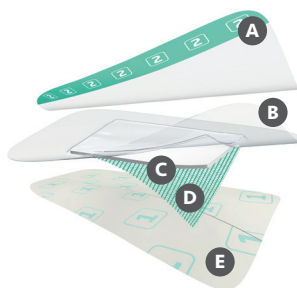

- A. Stabiliserende film med grønn markering for å gjøre påsettingen lettere
- B. Dusjtett og pustende polyuretanfilm med akrylkleber som beskytter mot kontaminering utenfra og lar overflødig væske fordampe
- C. Absorpsjonspute
- D. Sorbact sårkontaktlag som reduserer den mikrobielle belastningen i såret
- E. Beskyttelsefilm som tas av

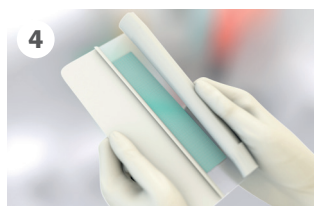

For detaljert produktinformasjon, kontraindikasjoner, forholdsregler og advarsler, les gjeldende bruksanvisning (IFU) før bruk.

Sorbact® Surgical Dressing

Varenr.	Størrelse	Sårputestørrelse	Stk./pakke
98140-50	5 x 7.2 cm	2.8 x 4 cm	50
98141	8 x 10 cm	4 x 6 cm	20
98142	8 x 15 cm	4 x 11 cm	20
98143	10 x 20 cm	5 x 16 cm	20
98144	10 x 25 cm	5 x 20 cm	20
98145	10 x 30 cm	5 x 25 cm	20
98146	10 x 35 cm	5 x 30 cm	20



1. Stanirowski PJ et al. Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbamoyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing cesarean section. Surg Infect (Larchmt). 2016;17:427-435. 2. Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 2008;4:10-18. 3. Husmark J et al. Antimicrobial effects of bacterial binding to a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing: an in vitro study. J Wound Care. 2022;31:560-570. 4. Stanirowski PJ et al. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 2019;28:222-228.

Les mer på sorbact.no

Sorbact® Technology-bandasjer hjelper pasienter i mer enn 65 land gjennom våre varemerker Sorbact®, Cutimed® Sorbact®, Cutimed® Siltec® Sorbact®, Cutimed® Sorbion® Sorbact® og Leukoplast® Leukomed® Sorbact®.