


STØRRELSER

Produkt	Ref.nr.	Str.	Str. sårdyne	stk./pakning
Sorbact® Surgical Dressing	98140	5x7,2 cm	2,8x3,8 cm	100
Sorbact® Surgical Dressing	98141	8x10 cm	4x5 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98142	8x15 cm	3,8x10 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98143	10x20 cm	5x15 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98144	10x25 cm	5x20 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98145	10x30 cm	5x25 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98146	10x35 cm	5x30 cm	20

FOREBYGGING AV POSTOPERATIVE SÅRINFEKSJONER
SORBACT® SURGICAL DRESSING

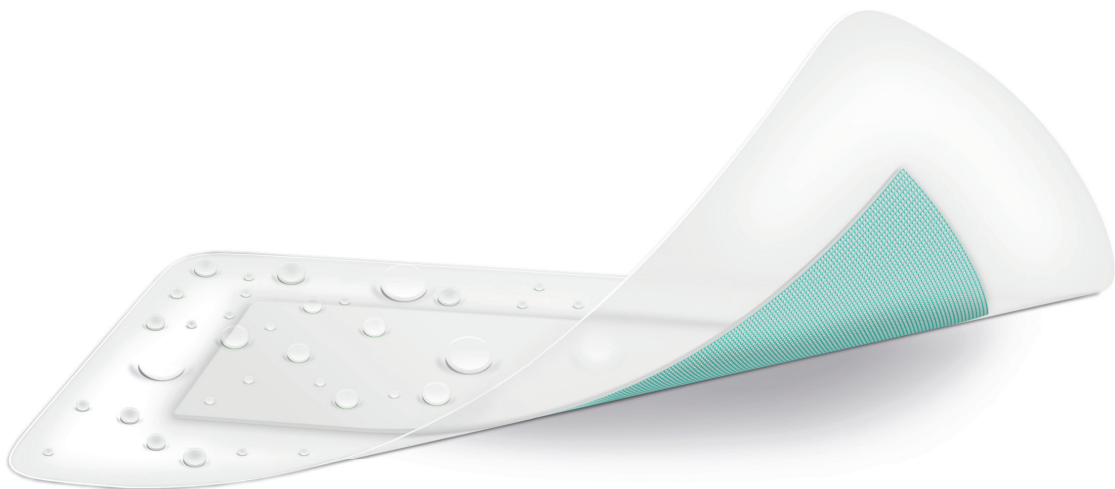

2018-27

Sorbact® er en svensk innovasjon, og sortimentet av sårbandasje selges via ABIGO-partnere og -forhandlere i over 65 land over hele verden. I visse regioner selges Sorbact® som Cutimed® Sorbact® og Leukomed® Sorbact®. Finn din lokale forhandler på abigo.com. Sorbact® er et registrert varemerke som eies av ABIGO Medical AB.




DEN KOSTNADSEFFEKTIVE MÅTEN Å UNNGÅ INFEKSJON I OPERASJONSSÅR


Infeksjon i operasjonssår (SSI) er en vanlig post-operativ komplikasjon, og hvert år forekommer det ca. 160 000–300 000 tilfeller i USA.¹ Hvert SSI-tilfelle er forbundet med ca. 7–11 ekstra postoperative sykehusdøgn.¹ En prevalensstudie utgitt i 2012, viste at SSI-er var den mest vanlige helserelaterte infeksjonen, ved at den stod for 31 prosent av alle helserelaterte infeksjoner blant inneliggende pasienter.²

En randomisert, kontrollert studie blant 543 kvinner som gjennomgikk elektiv eller akutt lavt transversalt keisersnitt viste at risikoen for SSI ble betydelig redusert med Sorbact® Surgical Dressing sammenlignet med standard operasjonsbandasje.³ Denne studien bekreftet hvor effektiv og kostnadseffektiv Sorbact® Surgical Dressing er for å unngå SSI blant kvinner som gjennomgår keisersnitt.

PROSENT AV INFEKSJON I OPERASJONSSÅR

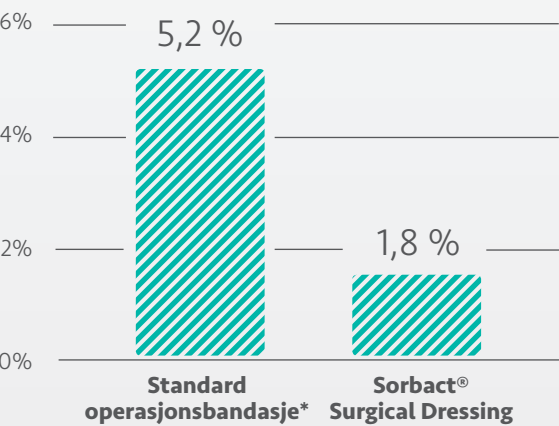

TOTAL ESTIMERT KOSTNAD

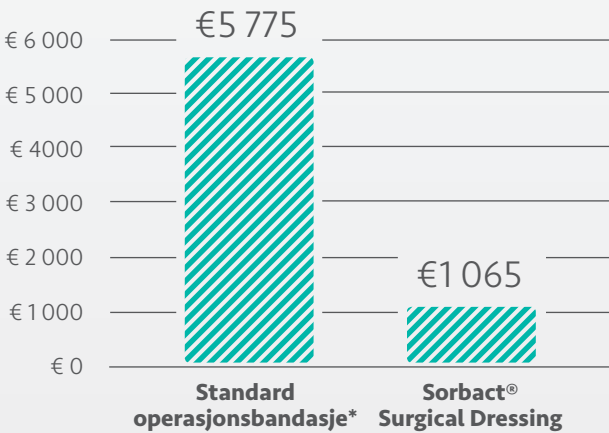

p = 0.04 | *Tegaderm™ + Pad

	STANDARD SURGICAL DRESSING (n=271)	SORBACT® SURGICAL DRESSING (n=272)	P VERDI
Antall pasienter med SSI	14 (5.2%)	5 (1.8%)	0.04
Antall pasienter som behøvde legges inn på sykehus på nytt	3 (1.1%)	0	0.24
Antall pasienter som behøvde systemisk antibiotika	1 (1.5%)	0	0.13

Andelen SSI i Sorbact® Surgical Dressing-gruppen var 1,8 %, noe som var betydelig lavere sammenlignet med 5,2 % i kontrollgruppen (p=0,04). Den totale kostnaden med SSI-behandling var høyere i kontrollgruppen sammenlignet med Sorbact® Surgical Dressing-gruppen (hvh. 5 775 euro vs. 1 065 euro).

REFERANSER

1. Anderson DJ, Podgorny K, et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. Infect Control Hosp Epidemiol 2014; 35(6):605–627.


2. Magill SS, Hellinger W, et al. Prevalence of health-care-associated infections in acute care hospitals in Jacksonville, Florida. Infect Control Hosp Epidemiol 2012; 33(3):283–291.

3. Staniowski PJ, Bizón M, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbomoyl Chloride (DACC) Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Hosp Infect Epid 2016; [in press].

SORBACT® SURGICAL DRESSING




Sorbact® Surgical Dressing er en steril bakterie- og sopppbindende sårbandasje. Den består av en grønn Sorbact®-kontaktflate kombinert med en absorberende sårpute og en transparent, selvklebende akrylfolie. Sorbact® Surgical Dressing absorberer og holder på sårveske. Den vanntette og pustende baksidefolien beskytter mot kontaminasjon utenfra og slipper ut overskuddsvæske.

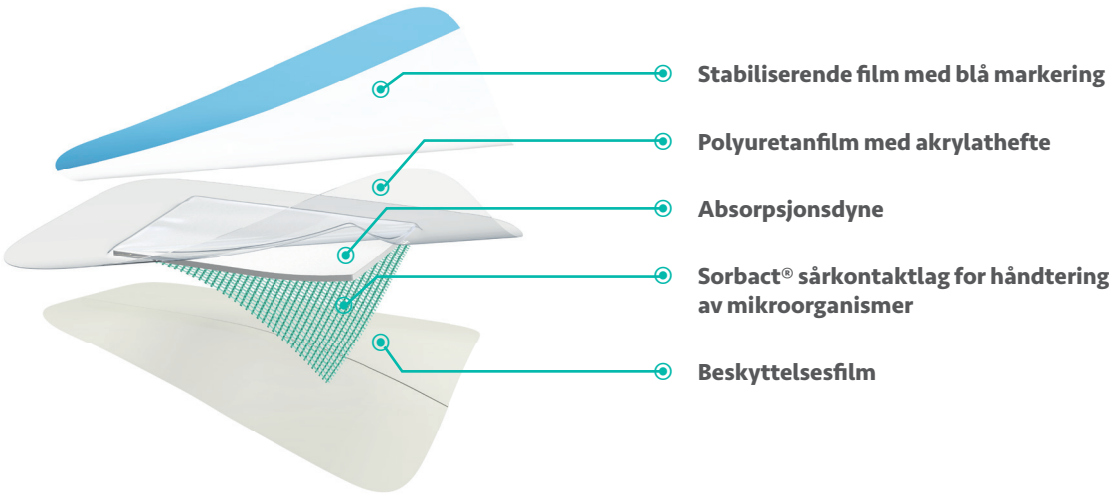

BRUKSANVISNING

- Klargjør såret i samsvar med lokal klinisk praksis. Kontroller at den omkringliggende huden er ren og tørr.
- Velg en passende bandasjestørrelse for såret.
- Fjern bandasjen fra forpakningen ved bruk av aseptisk teknikk.
- Fjern beskyttelsesfolien fra bandasjens sårkontaktflate.
- Sett på bandasjen. Kontroller at den grønne sårkontaktflaten kommer i direkte kontakt med hele såroverflaten.
- Press kantene mot den omkringliggende huden.
- Fjern den ytterste stabiliseringsfilmen. Start ved den blå markøren.

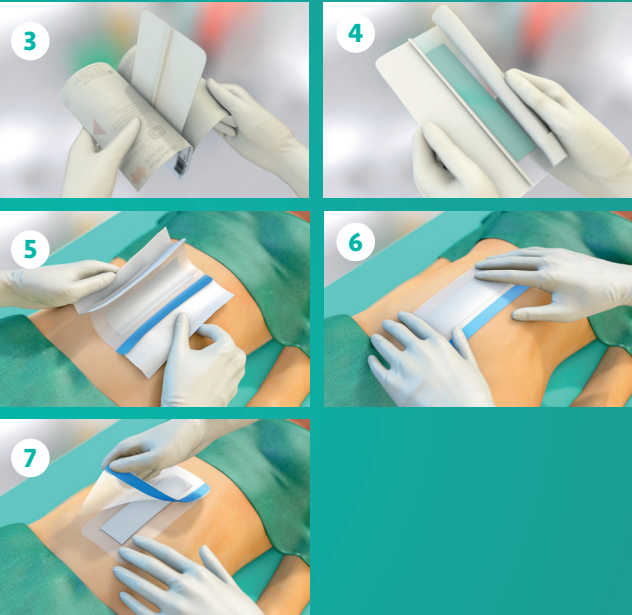

Dersom den kliniske tilstanden tillater det, kan bandasjen bli sittende i opptil 7 dager.