

ENKELT ER EFFEKTIVT.

# AFINION<sup>™</sup> 2



Afinion 2 analysator er et resultat av flere års kontinuerlig innovasjon og produktforbedring, og gir pasientnære resultater på noen få minutter.



# Afinion™ 2 analysator

## OM

Med sin kompakte størrelse og panel av tester, er Afinion 2-systemet ideelt for pasientnær testing på legekontorer, klinikker, lokale helsesentre, sykehjem, akuttinntak og poliklinikker. Med en fingerstikkprøve blir laboratorie kvalitet resultater for CRP, HbA1c, ACR og lipidpanel tilgjengelige i løpet av konsultasjonen.

## FORDELER MED PASIENTNÆR TESTING

Redusert arbeidsbelastning ved praksisen:<sup>1</sup>

- Færre oppfølgingssamtaler via telefon
- Færre oppfølgingsbrev
- Færre ekstra pasientbesøk

Mer informasjon ved beslutningstaking bedrer forholdet mellom lege og pasient, og styrker pasientens motivasjon og holdning.<sup>2</sup>

## 3-TRINNS PROSEDYRE

**1** Ta prøven med den integrerte prøvetakeren.



**2** Sett prøvetakeren tilbake i testkassetten.



**3** Sett testkassetten inn i analysatoren og lukk lokket. Prosesseringen starter automatisk.



## TESTER

Afinion-testene kan brukes med både Afinion 2 og Afinion AS100.  
Alere Afinion™ ACR · HbA1c · CRP · Lipidpanel



## FAKTA

- Størrelse: 200 mm B x 186 mm H x 328 mm D
- Vekt: 3,4 kg
- LCD-berøringsskjerm med farger
- Pasient- og kvalitetskontroll-ID, og resultater lagret i minnet
- Ikke behov for vedlikehold
- Ikke behov for operatørkalibrering
- Omfattende feilsikringssystem hindrer muligheten for feilaktige resultater
- QC- og operatør lock-out

## TILKOBLINGSMULIGHETER

Afinion 2-analysatoren kan på en sikker måte overføre testresultater til et informasjonssystem. Bruk Ethernet-kabelen for å koble analysatoren til et informasjonssystem. Afinion 2-analysatoren vil automatisk overføre pasient- og kontrollresultater til et tilkoblet LIS/HIS/EMR-system via TCP/IP-nettverket med bruk av protokollene POCT1-A,

HL7, ASTM 1381-85 (lavt nivå) eller ASTM 1394-97 (høyt nivå). Dette velges ved konfigurering. Med innebygde tilkoblingsmuligheter kan Afinion 2 kommunisere med LIS- og HIS-systemer for å dele og behandle data mer effektivt, noe som bidrar til bedre pasientbehandling.

1. Crocker JB, Lee-Lewandrowski E, Lewandrowski N, et al. Implementation of point-of-care testing in an ambulatory practice of an academic medical center. Am J Clin Pathol. 2014;142:640-6.

2. Laurence CO, Gialamas A, Bubner T. Patient satisfaction with point-of-care testing in general practice. Br J Gen Pract. 2010;60(572): e98-e104.