

COBAS KONTROLL D-DIMER TIL COBAS H232

Kontroll til D-Dimer Cardiac på cobas h232 instrument. Inneholder 2 flasker frysetørret kontrollserum i 2 nivåer. Tilsettes 1,0 ml destillert vann. Analyseres på samme måte som en fullblodsprøve (150 ul). Referanseverdiene ligger i kodebrikken.

Oppbevaring og holdbarhet Oppbevares ved 2-8°C. Holdbarheten til det frysetørkede kontrollserum ved 2-8°C: inntil den oppførte utløpsdato. Holdbarheten til komponentene i det løste kontrollserum: ved 2-25°C: 24 timer. Ved -20°C: 6 uker (kan fryses opp til 5 ganger i originalflasken) Oppbevar kontrollene tett lukket når de ikke er i bruk.

