

Bruksanvisning för Aleres drogtester

Denna bruksanvisning visar hur du enkelt, snabbt och säkert använder Aleres olika drogtester. Samma hantering gäller för både singel- och multitestet.

1



Samla urinen i en ren och torr bägare.

2



Öppna förpackningen och tag ut testet i direkt anslutning till provtagningen. Tag av skyddshylsan på multitestet.

Ställ ner testet i bägaren. OBS! Urinnivån får ej överstiga testets uppsugningsdel. Vid behov, håll över lite urin till en annan bägare. Resterande urin sparas för ev. verifikation.

3



Tag upp och läs av testet efter 5 minuter. OBS! Testresultatet ska ej avläsas senare än 10 minuter efter påbörjat test.

Exempel på testresultat för Multi 4 test


NEGATIVA:
Samtliga

POSITIVA: Amfetamin och THC
NEGATIVA: Bensodiazepiner och opiater



← testplatser →

← uppsugningsdel →

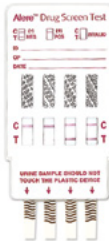

NEGATIVT RESULTAT

Så snart två streck kan anas är testet negativt. Observera att test-strecket (T) framträder svagare än kontroll-strecket (C).

POSITIVT RESULTAT

Där endast ett rosa streck (kontroll-strecket C) framträder är resultatet positivt. Vid positivt resultat rekommenderas att urinprovet skickas för verifikation.

OGILTIGT RESULTAT

Om kontrollstreck (C) uteblir är testet ogiltigt och nytt test bör tas.



Enhagsslingan 17
Box 1148
183 11 Täby

Tel: 08-544 717 30
E-post: toxse@alere.com
www.aleretoxicology.se