


Bare til profesjonell in vitro-diagnostikk. For fullstendig beskrivelse, se pakningsvedlegg som er inkludert i hver pakke. Les instruksjonene før prøvetaking.

Testprosedyre

La testenheten og urinprøven oppnå romtemperatur (15–30 °C) før testing.

1. Ta enheten ut av den forseglede posen, og plasser den på et rent og plant underlag.
2. Bruk plastpipetten som følger med, sett spissen i prøven, og klem sammen den øverste ballongen helt (A). IKKE klem den nederste ballongen (B) når pipetten brukes. Slipp den øverste ballongen for å trekke opp væske. Prøven (100 µL) trekkes inn i den nedre delen av pipetten. Overskytende prøve vil bli trukket inn i den nedre ballongen.
3. Fjern pipetten fra prøven. Klem den øverste ballongen helt sammen for å tilsette prøven **forsiktig** i prøvehullet (S), og start tidtakeren. Bruk en ny pipette for hver test som utføres, selv om den samme urinprøven benyttes.
4. Les av resultatet 3 minutter etter at prøven er tilsatt. Resultater skal ikke tolkes etter at det har gått mer enn 3 minutter. Det er viktig at bakgrunnen er gjennomskiktig før resultatet leses av.

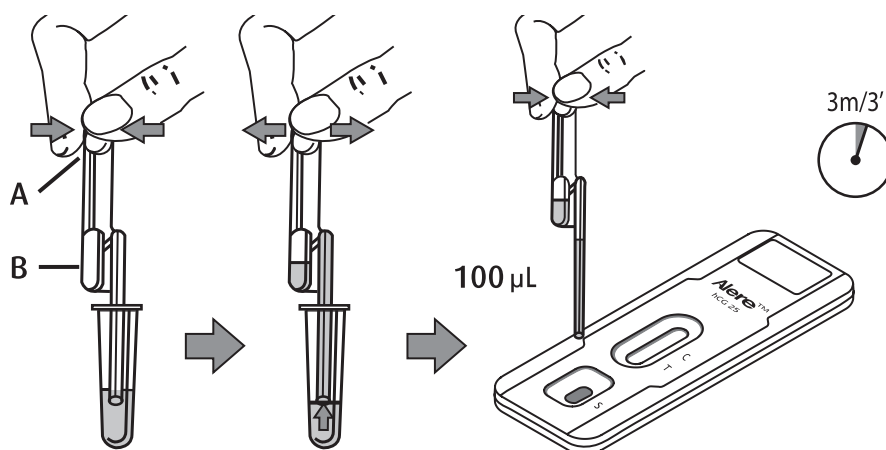

Tolkning av resultater

POSITIVT RESULTAT: Det vises to linjer med forskjellige farger.

Den ene linjen vil vises i feltet for kontrollinje (C) og den andre linjen vil vises i feltet for testlinje (T). Fargeintensiteten til linjene kan variere, derfor skal alle fargenyanser i testlinjefeltet tolkes som et positivt resultat.

NEGATIVT: Én farget linje vises i kontrollinjeområdet (C).

Det vises ingen tydelig linje i testlinjeområdet (T).

UGYLDIG: Det vises ingen kontrollinje.

Utilstrekkelig prøvevolum eller ukorrekte prosedyreteknikker er de mest sannsynlige årsakene til manglende kontrollinje. Gå gjennom prosedyren, og gjenta testen med en ny enhet. Hvis problemet vedvarer, må du slutte å bruke settet straks og kontakte den lokale den lokale forhandleren.

