

Bruksanvisning för Aleres drogtest

Denna bruksanvisning visar hur du enkelt, snabbt och säkert använder Aleres olika drogtest. Samma hantering gäller för både singel- och multitester.

1



Samla urinen i en ren och torr bägare.

2



Öppna förpackningen och tag ut testet i direkt anslutning till provtagningen. Tag av skyddshylsan på multitestet.

3



Ställ ner testet i bägaren. OBS! Urinnivån får ej överstiga testets uppsugningsdel. Vid behov, håll över lite urin till en annan bägare. Resterande urin sparas för ev. verifikation.

Tag upp och läs av testet efter 5 minuter. OBS! Testresultatet ska ej avläsas senare än 10 minuter efter påbörjat test.

Exempel på testresultat för Multi 4 test

NEGATIVA:
Samtliga

POSITIVA: Amfetamin och THC
NEGATIVA: Bensodiazepiner och opiat



← testplatser →

← uppsugningsdel →



NEGATIVT RESULTAT

Så snart två streck kan anas är testet negativt. Observera att test-strecket (T) framträder svagare än kontroll-strecket (C).

POSITIVT RESULTAT

Där endast ett rosa streck (kontroll-strecket C) framträder är resultatet positivt. Vid positivt resultat rekommenderas att urinprovet skickas för verifikation.

OGILTIGT RESULTAT

Om kontrollstreck (C) uteblir är testet ogiltigt och nytt test bör tas.