

Tensocold® Pack

UMIDDELBAR KJØLING

Tensocold® Pack er et engangsprodukt som er egnet til å gi lokal smertelindring og effektiv kjøleterapi i inntil 30 minutter. Produktet inneholder karbamid med vann forseglet i en innerpose. Produktet aktiveres ved at innerposen først slås i stykker og så ristes.

Raskt og enkelt

- Kan brukes omgående – trenger ikke kjøles eller fryses
- Lett å bruke – det er bare å slå og riste for å aktivere produktet
- Forblir aktiv i inntil ca. 30 minutter

Tiltenkt bruk

Ved hematom/blåmerker, forstuinger, heteslag, feber og trauma.

Bruksanvisning

1. Slå til posen med fast hånd slik at innerposen med vann går i stykker.
2. Miks blandingen for å oppnå maksimal kjøling, legg tøy mellom huden og kjøleposen.
3. Engangspakke, kastes etter bruk.

Notera

- Bare til utvendig bruk. Ikke legg posen direkte på sår.
- I tilfelle av sirkulatoriske sykdommer eller hudfølsomhet, skal produktet bare brukes etter medisinsk rådgivning.
- Hvis innholdet kommer i kontakt med øyne eller hud, må du skylle umiddelbart med vann i 15 minutter og kontakte lege. Ved svelging må du drikke 1/2 halv liter varmt vann. Ikke fremkall brekninger, kontakt lege.
- Posen skal bare brukes hvis den er helt forseglet. Du må ikke åpne eller punktere pakken etter bruk. Kastes i henhold til lokale forskrifter.
- Oppbevares tørt og kjølig

Materiale

Karbamid (urea) og vann.



BESTILLINGSINFORMASJON

Art nr	Størrelse	Antall/pk
47423-01	14,5 cm x 24 cm	24

BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · SE-427 40 Billdal
Tlf: 22 98 04 00 · Faks: 22 98 04 01

kundeservice.norge@bsnmedical.com
www.bsnmedical.no

