

Tensoplast®

Traktionsförband



Häftande
Ej häftande
För barn och vuxna
Allt i ett

TENSOPLAST® Traktionsförband kan användas som en effektiv och pålitlig sträckbehandling kombinerat med vikter. Traktionsförbandet finns i både häftande och ej häftande version för både vuxen och barn. Det är lätt att använda och är anpassningsbart för olika metoder.

FÖRDELAR

Häftande

Banden är försedda med häftmassa av akryl för att ge maximal vidhäftning. Häftmassan är icke sensibiliserande.

Ej häftande

Banden är laminerade med polyuretanskum av slutna celler som ger maximalt grepp mot huden.

1. Den strukturerade ytan gör för god luftgenomsläpplighet.
2. Bandaget förstärker friktionen mot huden, vilket minimerar behovet av justeringar.
3. Plattan är designad för en effektiv passage av linan.
4. Det mjuka polstret av skumplast skyddar mot skav och tryck.
5. Linan är tillverkad av ett hållbart och slitstarkt material.

BRUKSANVISNING FÖR HÄFTANDE TRAKTIONSFÖRBAND

Förbered huden före applicering. Patientens ben bör rakas för att underlätta god vidhäftning.

1. Placera foten i dorsalflexion och se till att plattan med linan placeras ca 5 cm från fotsulan för att tillåta rörelsefrihet och för att samtidigt ge skydd över benutskott och fotens utsida.
2. Rulla upp banden och tag bort skyddspapperet samtidigt som det appliceras på benet.
3. Med denna teknik är det lättare att anpassa banden efter benet och klippa av efter behov. Proceduren upprepas på benets andra sida.
4. Maximal vidhäftning uppnås med bindan. Påbörja bandageringen vid ankeln med en eller två spiralturer runt foten. Fortsätt linda upp över benet med konstant sträckning och fäst.
5. Avsluta med vikttyngd och se till att linan från plattan sträcks ut vågrätt.

BRUKSANVISNING FÖR EJ HÄFTANDE TRAKTIONSFÖRBAND

1. Placera foten i dorsalflexion och se till att plattan med linan placeras ca 5 cm från fotsulan för att tillåta rörelsefrihet och för att samtidigt ge skydd över benutskott och fotens utsida. Därefter rullas bandet ut längs med benets in- eller utsida. Observera att bild 2 visar applicering av häftande traktionsförband
2. Banden anpassas efter benet och klippas av efter behov. Proceduren upprepas på benets andra sida.
3. Påbörja bandageringen vid ankeln med en eller två spiralturer runt foten. Fortsätt linda upp över benet med konstant sträckning och fäst.
4. Avsluta med vikttyngd och se till att linan från plattan sträcks ut vågrätt.

V g se bruksanvisning i förpackningen beträffande bilder.

Tensoplast®

Traktionsförband

BEHANDLINGSMETODER

- **Enkelt viktsträck**

För att uppnå fullgod sträckning med en enda lina klipps den av ca 20 cm från plastfördelaren och knyts fast i den andra linan.

- **Thomasskena**

Ingen ändring är nödvändig om traktionsförbandet ska användas på höftbenets övre del eller på annan fraktur där en Thomasskena är lämplig. För medial rotation är det viktigt att se till att linorna förs runt skenans sida för att därefter knyts fast på skenan.

- **Russelmetoden**

Båda linorna ska klippas av ca 20 cm från plastfördelaren och knyts fast igenom ett litet hissblock. Diskskada kan behandlas med ett enkelt viktsträck på ena benet eller båda benen och med lätt vikt på 1 kg. Linorna ska hänga utmed sänggaveln och ej igenom ett block/trissa.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDE

1. Förhindra veckbildning

2. Var observant vid över

BSNmedical

FINNS I FÖLJANDE STORLEKAR

TENSOPLAST traktionsförband finns i två storlekar.

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg
71544-00	vuxen häftande	12	12	vit
71554-00	barn häftande	12	12	vit
71555-00	vuxen ej häftande	12	12	vit
71556-00	barn ej häftande	12	12	vit

* varumärke för BSN medical

