

Produktet

Gypsona@S er en vannaktiverbar gips og spjelkingsbandasje. Brukes til alle typer gipsbehandlinger. Lett å forme med rask immobilisering. Lett å fjerne med sag eller gipssaks.

Gasvev av 100% bomull impregnert med høyverdig gipsmasse.



Bruksanvisning

- Appliker stockinette tubebandasje og deretter polstringsvatt på området som skal gipses.
- Bruk romtemperert vann (ca 20-25 grader).
- Dypp rullen i vann ca 3-5 sek.
- Modelleringstid: 130-160 sek.
- Vent minimum 30 min før pasienten flyttes fra gipsrommet.
- Kan belastes etter 24-36 min, avhengig av antall lager.
- Oppbevares tørt og kjølig.