

Kjølende/varmende gelekompress



Til akutt nedkjøling av idrettsskade, vridning, forstuing
Minsker hevelse
Minsker smerte

Physiopack® er en grønn gelepose som er praktisk og kan brukes flere ganger til varme- eller kjølebehandling. Den er enkel i bruk på alle deler av kroppen.

FORDELER

Øker sammentrekning i kar, minsker smerte og hevelse

Varmebehandling

Øker blodsirkulasjon og elastisitet i fibre samt minsker smerte.

Gjenbruk

Bekvem å bruke og fikseres på et særskilt område med kohesive bandasjer.

BRUKSANVISNING

Forberedelser ved varmeterapi

Kokende vann: legg posen i påsen 7 min i kokt vann.

Mikroovn: 20 sekunder Max 800 w.

Forberedelser ved kjøleterapi

Fryser ved -25°C: Produktet oppnår adekvat temperatur etter 2 timer. Tilpass nedkjølingstid eller kjøleskapets eller frysers temperatur.

Bruk alltid beskyttelsesduk mellom **Physiopack®** og huden for å unngå risiko for brannskade.

Kjøleposen er klar for øyeblikkelig bruk for å gi akutt behandling av muskelskade, hematom, vridning eller forstuelse.

FORSIKTIG BRUK

Kun til utvortes bruk.