

Måleskjema JOBST® US strømper

		 b Ankel (tynneste)	 c Legg (tykkeste)	 g Lår (bredeste)	 k Hofte (over hoftebena)
Knestrømpe, Lårstrømpe, Strømpebukse	Small	18-21 cm	28-38 cm	40-62 cm	71-117 cm
	Medium	21-25 cm	30-42 cm	46-70 cm	76-127 cm
	Large	25-29 cm	32-46 cm	54-78 cm	81-137 cm
	X-large	29-33 cm	34-50 cm	60-81 cm	102-166 cm
Strømpebukse for gravide (kun UltraSheer)	Small	18-21 cm	28-38 cm	40-62 cm	81-132 cm
	Medium	21-25 cm	30-42 cm	46-70 cm	86-142 cm
	Large	25-29 cm	32-46 cm	54-78 cm	91-152 cm
	X-large	29-33 cm	34-50 cm	60-81 cm	112-180 cm
Travel Socks	1	18-21 cm	27-37 cm		
	2	20-23 cm	30-40 cm		
	3	22-25 cm	33-43 cm		
	4	24-27 cm	36-46 cm		
	5	26-29 cm	39-49 cm		

Kundens mål	b Ankel	c Legg	g Lår	k Hofte

Ultra Sheer

- ☐ Knestrømpe
☐ Lårstrømpe
☐ Strømpebukse
☐ Strømpebukse
 for gravide

Opaque

- ☐ Knestrømpe
☐ Lårstrømpe
☐ Strømpebukse

For Men

- ☐ Knestrømpe
☐ Lårstrømpe

For Men Casual

- ☐ Knestrømpe

ActiveWear

- ☐ Knestrømpe

Sport

- ☐ Knestrømpe

Travel Socks

- ☐ Knestrømpe

For knestrømpe - mål ankel (b) og legg (c)

For lårstrømpe - mål ankel (b), legg (c) og lår (g)

For strømpebukse - mål ankel (b), legg (c), lår (g) og hofte (k)

Fotlengde - universal

Kundens navn _____

Adresse _____

Telefon _____

Kommentarer _____

Indikasjoner og kompresjonsklasser

	Indikasjoner	Kontraindikasjoner
Klasse 1 - 15-20 mmHg ¹	• Tyngdefornemmelse i bena • Lette hevelser • Lette/begynnende åreknuter • Lette åreknuter og hevelser i forbindelse med graviditet	• Akutt betennelse i huden
Klasse 2 - 20-30 mmHg ¹	• Moderate til kraftige åreknuter • Etter åreoperasjoner • Årebetennelse • Venøse leggsår • Etter blodpropp • Etter kirurgiske inngrep	• Arteriell insuffisiens (f.eks. hjertesvikt) • Akutt betennelse i huden • Brukes med forsiktighet ved diabetes
Klasse 3 - 30-40 mmHg ¹	• Lymfødem • Kraftige åreknuter • Etter kirurgiske inngrep	• Arteriell insuffisiens (f.eks. hjertesvikt) • Akutt betennelse i huden • Brukes med forsiktighet ved diabetes

1) Kompresjonstrykk på en gjennomsnittlig ankelstørrelse.