



SpeediCath® Flex Set

SpeediCath Flex Set er et skånsomt og hygienisk kateter med en integrert urinpose. Med vår unike Triple Action Coating Technology har kateteret en hydrofil overflate som reduserer risikoen for urinveisinfeksjoner og skader på urinrøret.*

Den fleksible katetertuppen og den tørre innføringshylsen gjør innføringen skånsom og hygienisk. Kateteret føres inn med et gripehåndtak. Den integrerte urinposen er enkel å åpne og tømme. Etter tømning legges kateteret tilbake i den diskre pakningen og kastes i vanlig restavfall.

Produktoversikt SpeediCath® Flex kateter for menn



	CH	Farmalogg nr.	Coloplast nr.
SpeediCath® Flex	10	918976	289200
SpeediCath® Flex	12	975106	289220
SpeediCath® Flex	14	896137	289240
SpeediCath® Flex	16	820784	289160
SpeediCath® Flex Set	12	819103	289320
SpeediCath® Flex Set	14	987127	289340

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast AS er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S 3050 Humlebæk, Danmark © 03-2022.
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
Coloplast Norge AS, Postboks 162, 0612 Oslo. Telefon 22 57 50 00, www.coloplast.no.
440N00502. PM-21154



LAYOUT OG TRYK: RIBA TRYKKERI AS


Bruerveiledning for SpeediCath® Flex Set



SpeediCath® Flex Set
- utviklet for deg


* Sammenlignet med kateter uten hydrofil overflate.

Veiledning

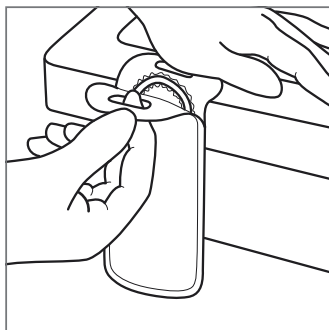


Forberedelse


Trekk i ringen på flikene og åpne pakningen med begge hender. Ved bruk av en hånd, fest klebeflaten på pakningen til en flat overflate og dra i den ene fliken for å åpne pakningen.

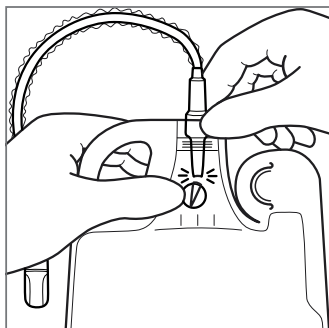

De turkise symbolene indikerer handlingspunkter. Knekk tappen på innsiden av posen for å frigjøre den vannbaserte løsningen. Hold kateteret rett opp og dra fingrene dine nedover kateterhylsen for å få alt vannet ut.

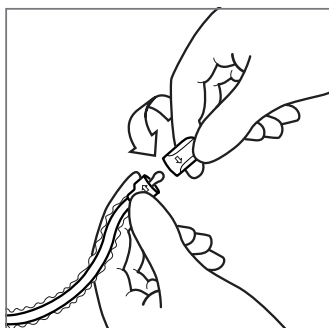


Skru av hetten øverst på kateterhylsen. Kateteret er nå klart til bruk. Bruk gripehåndtaket til å føre kateteret inn i urinrøret.

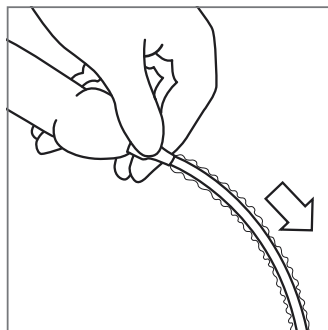

Innføring av kateter


Når katetertuppen er ført inn i urinrøret, hold så i penis og det turkise håndtaket i samme hånd. Med den andre hånden bruker du den tørre hylsen for å føre kateteret sakte inn i blæren.

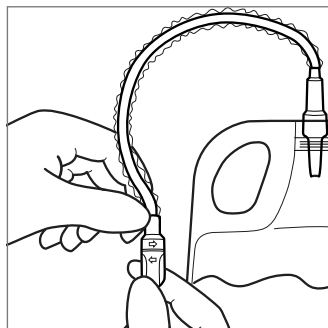


Tømming av posen

Når urinstrømmen stopper, trekkes kateteret ut 1-2 cm. Kommer det mer urin, venter du litt til urinstrømmen opphører. Trekk så hele kateteret ut.

Etter bruk lukkes kateteret med den turkise hetten.

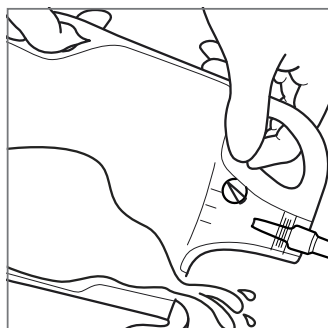

Trekk i den stiplede rivelinjen for å åpne urinposen. Hold i håndtaket for god støtte ved tømming av urinposen.

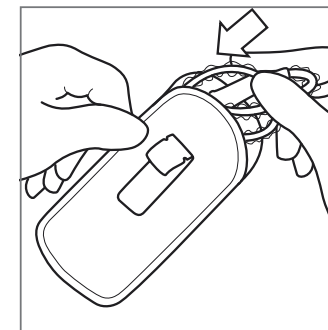

Kaste

Kateteret kan legges tilbake i pakningen og lukkes. Kastes i vanlig restavfall.



Les bruksanvisningen som ligger i esken før bruk av kateteret. Den inneholder viktig informasjon til deg som bruker kateter.

Coloplast®
Assistanse

Trine, sykepleier i Coloplast
gir råd og veiledning

22 57 50 20



Skann koden for å
se veiledningsfilm.

- coloplast.no
- assistanse@coloplast.com
- /coloplastassistanse
- /coloplastassistanse