


BRUKSANVISNING


DOFF'N'DONNER

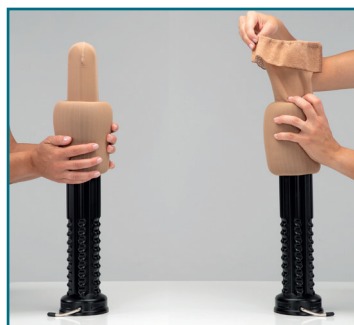

1) Tre strømpen på stangen med rette siden ut.



2) Tre ringen over strømpen. Dra strikken over ringen og rull oppover.

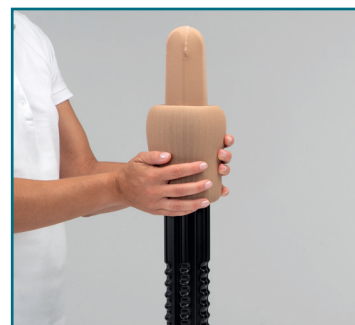

3) Rull hele veien opp.



4) Putt hånden inn for å få frem tåhetten. Legg merke til hvor hælen er.



5) Sett tåhetta over tærne og rull strømpen oppover. Obs! Sørg for at hæl er på riktig plass.



6) Rull påtrekker og strømpe helt opp.



7) Sørg for at strømpen sitter ordentlig på. Husk å dra ut tåhetten.



Doff'n'Donner kan brukes til ulike strømper. Det anbefales å bruke Sigvaris gummihansker.