

HemoCue Glucose 201 Mikrokyvetter

Engangskyvetten er fremstilt av polystyren og har en kavitet som rommer cirka 5 µL. Innerveggene på kyvettens kavitet er dekket med reagens i tørr form. Prøven suges inn i kyvetten ved hjelp av kapillærkraft og blandes spontant med reagensen. Kapillært, venøst eller arterielt blod kan brukes. Den fylte kyvetten plasseres i en HemoCue Glucose 201 eller i HemoCue Glucose 201⁺ analyser der absorbansen måles og glukosenivå regnes ut.

Kjemisk metode:	En modifisert glukoshydrogenasemetode.
Holdbarhet:	Uåpnet boks lagret i kjøleskap er holdbar til utløpsdato, 9 måneder fra produksjonsdato
	Åpnet boks lagret i kjøleskap er holdbar i 4 uker eller 3 dager i romtemperatur.
Forpakning:	4 x 25 kyvetter.

