



VACUETTE® Säkerhetsset för blodprovtagning




1 Öppna förpackningen enligt anvisning.

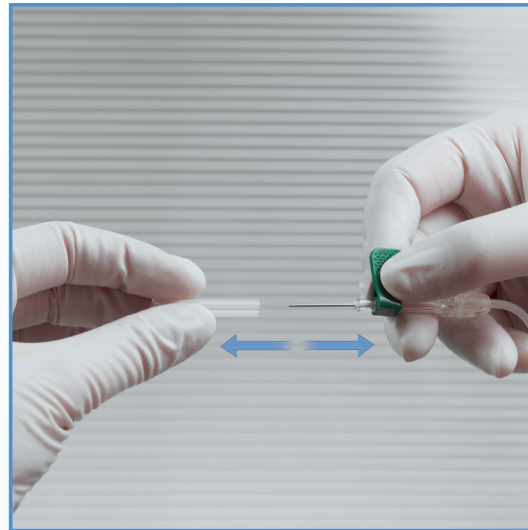


2 Dra av kanylskyddet rakt ut.

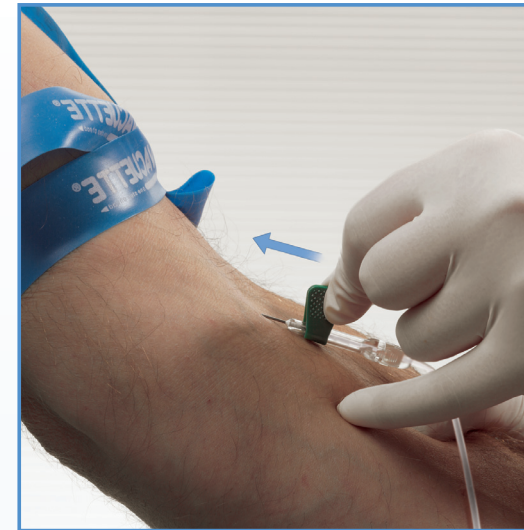


3 Genomför venpunktionen.

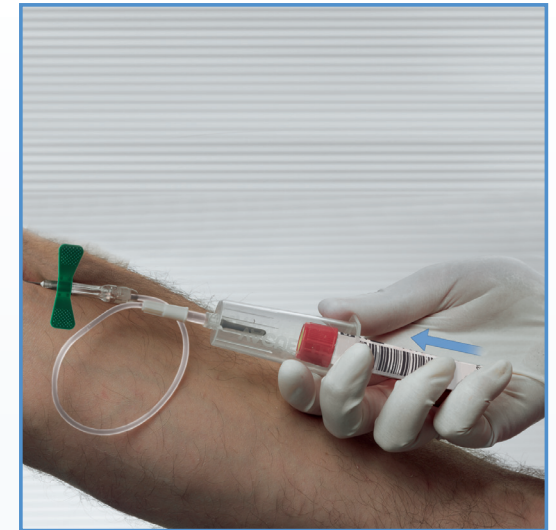

4 Sätt i röret.

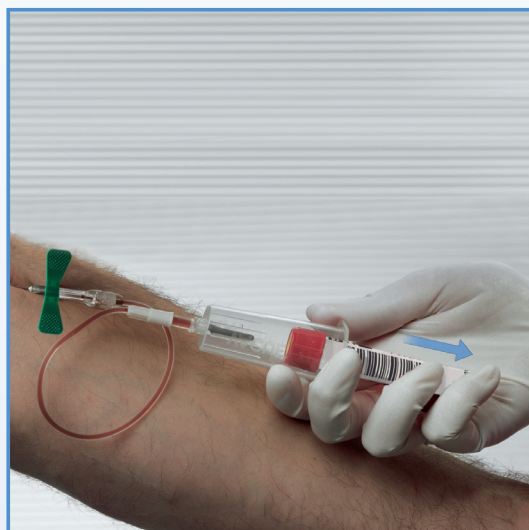

5 Avlägsna det sista röret.

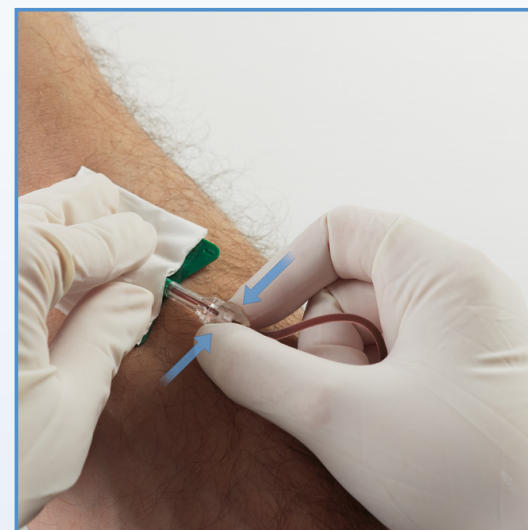

6 Aktivera säkerhetsmekanismen genom att trycka på båda sidorna av mekanismen så frigörs regeln som dras bakåt.



7 När klicket hörs är säkerhetsmekanismen aktiverad.



8 Kasta hela provtagningssetet i avfallsbehållaren.