


Simple Simon®PT


- kontroll av reagens med ZAP kontroll

1.

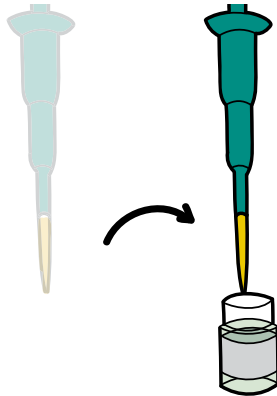

- Ta ut den blå bufferløsningen fra kjøleskapet, og la den få romtemperatur ved å holde den i hånden i 2 minutter.
- 2 x 200 µL buffer pipetteres over i kontrollflasken.
- Flasken rulles mellom hendene til alt kontrollmateriale er fullstendig oppløst. (ca 1. minutt)
- La deretter kontrollen modne i 10 min.

2.

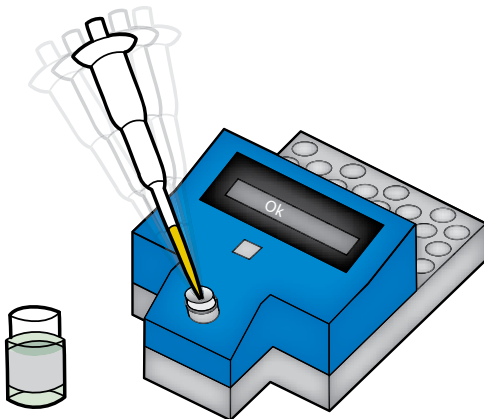

- Pipetter 10µl kontrollmateriale og utfør testen på Simple Simon PT.

3.

- Kontroll materialet, oppbevart i medfølgende små kopper med røde korker, er i følge leverandøren stabilt i 14 dager i kjøleskap.



Når kjøleskap ferdiglagret ZAP kontroll skal brukes anbefales det å blande kontrollen ved å knipse forsiktig på røret og deretter varme den litt i hånden for å gi den romtemperatur. Den bør tilbake i kjøleskapet innen en time for å fortsatt ha sin holdbarhet.

Referanseområdet til kontrollen står oppgitt i medfølgende pakningsvedlegg og kontrollskjema.