



QUICK GUIDE DIAQUICK Mononucleosis Cassette


1a Serum eller plasma:
Tilsett 1 dråpe serum eller plasma
og en dråpe buffer.

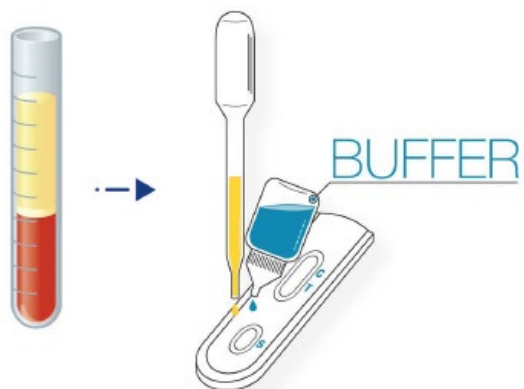


1b Kappilær eller venep prøve:
Tilsett en dråpe fullblod og en dråpe buffer.

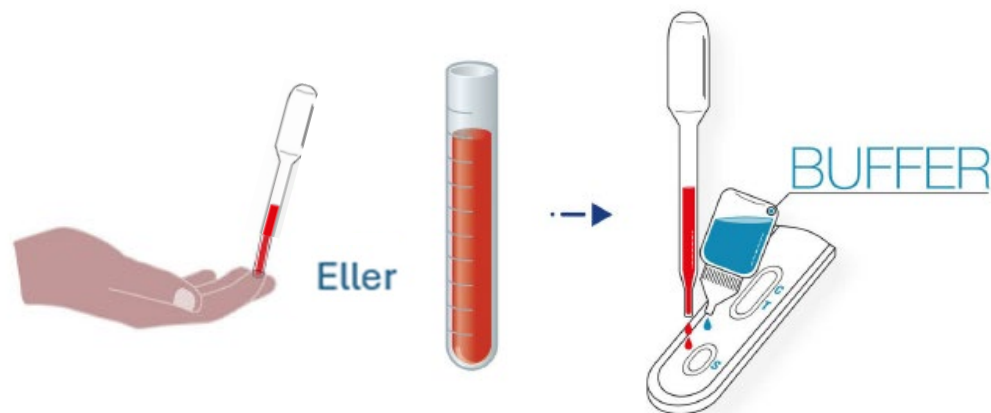

1c Positiv og Negativ kontroll:
Tilsett 2 dråper positiv eller negativ
kontroll.

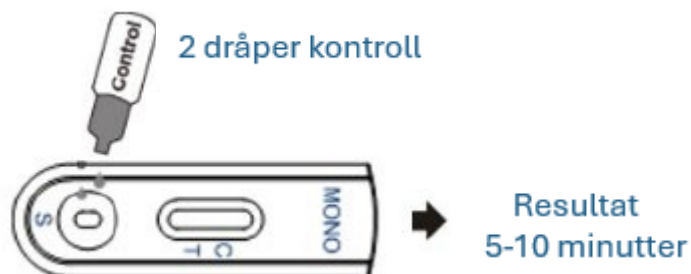

2 Les resultat ved 5 min.
Ikke tolk etter >10 min.

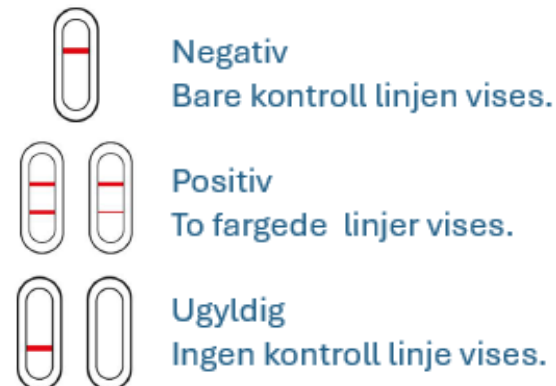

Det gjøres oppmerksom på at dette er en hurtiguide og det anbefales å lese pakkevedlegg!