

Reagensförvaring



Kit (teststickor och provrör)

Förvaring av öppnat kit i 2–30°C: till utgångsdatum

Förvaring av öppnat kit i 2–30°C: hållbart i 4 månader, dock ej efter utgångsdatum



Teststickor

Förvaring av oöppnat rör i 2–30°C: till utgångsdatum

Förvaring av öppnat rör i 2–30°C: hållbart i 4 månader, dock ej efter utgångsdatum




Provrör

Förvaring i 2–30°C: till utgångsdatum

Provrör med feces tillsatt kan förvaras i 2–25°C (2–8°C rekommenderas) i en vecka innan analys utförs

Provtagningsanvisning

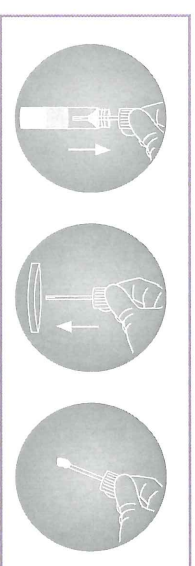


1 Skruva av korken med provtagningspinnen.

Lämna avföring på ett toalettpapper eller i ett rent engångskar.

Stick ner och rotera pinnen på olika ställen i avföringen så att färorna i änden av pinnen fylls. Torka bort överskott av avföring.

Stick ej ner pinnen där blod är synligt.

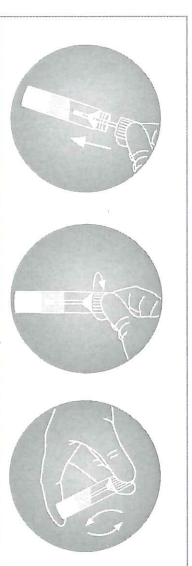

2 Sätt tillbaka korken med pinnen i röret och skruva fast den. Skaka därefter röret så att avföringen löses upp.

Efter provtagning

Röret kan förvaras i kylskåp (rekommenderas) eller i rumstemperatur. Skicka/lämna röret snarast till laboratoriet för analys. Provet ska analyseras inom en vecka efter provtagningen.




Orion Diagnostica Oy / Sverige
Box 520, 192 05 Sollentuna
Tel. 08-623 64 40, Fax 08-623 64 80
www.oriondiagnostica.se

8025-035E, 06Z016

Läs mer på www.oriondiagnostica.se

Actim Fecal Blood


Kort bruksanvisning

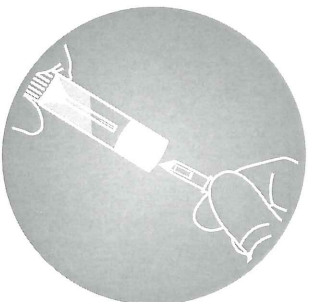

1 Rumstemperaera teststickkorna samt röret med prov före analys. Blanda provröret. Tryck provstickans vassa del genom perforeringen i provrörets botten tills det tar stopp.




2 Vänd **sakta** upp och ner på provröret och håll det så i **2 sekunder**. Vänd tillbaka provröret och ställ ner det på arbetsbänken.

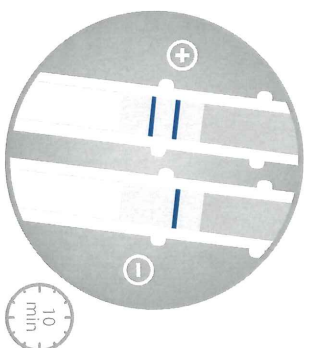


3 Avläs vid 10 minuter, se **Tolkning av resultat**. Linjer som framträder senare än 10 minuter ska inte tolkas.

Tolkning av resultat

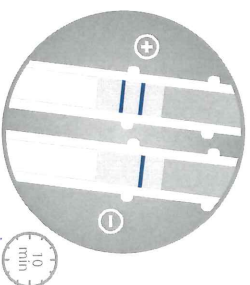

Positivt resultat
Två blå linjer i avläsningsfältet

Negativt resultat
Endast kontrollinjen (den övre linjen) i avläsningsfältet.

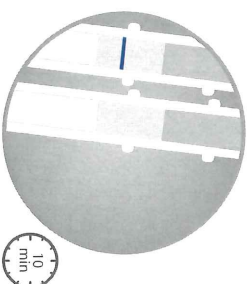

Ogiltigt resultat
Ingen kontrollinje (den övre linjen) ses i avläsningsfältet. Testet ska göras om med en ny teststicka.

*För utförlig metodbeskrivning,
se inlagan i förpackningen.*