

Check-Stix® Combo (3099227)




Positiv og negativ kontroll for Multistix® urinstix.

- ✓ Positiv Check-Stix® vil gi et positivt, eller forhøyet resultat på alle de 10 testfeltene som pr. i dag er tilgjengelige på Multistix® urinstix.
- ✓ Negativ Check-Stix® vil gi negative, eller normale analysesvar på tilsvarende testfelt (se tabell).

TEST	POSITIV CHECK-STIX®	NEGATIV CHECK-STIX®
GLUCOSE	1+ - 2+	NEGATIV
BILIRUBIN	1+ - 3+	NEGATIV
KETONER	1+ - 4+	NEGATIV
SPESIFIKK VEKT	1.000 - 1.015*	1.010 – 1.020
BLOD	2+ - 3+	NEGATIV
pH	≥ 8.0	6.0 - 7.0
PROTEIN	SPOR (±) - 2+	NEGATIV
UROBILINOGEN	≥ 33 µmol/L	< 16 µmol/L
NITRITT	POSITIV	NEGATIV
LEUCOCYTTER	1+ - 3+	NEGATIV

* Resultatet for spesifikk vekt må kompenseres for pH verdier > 6.5 (subtraher 0.005). Clinitek 100 gjør dette automatisk.



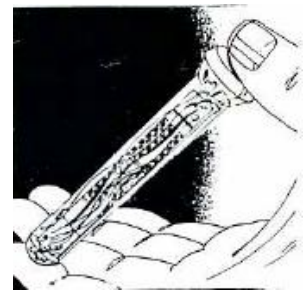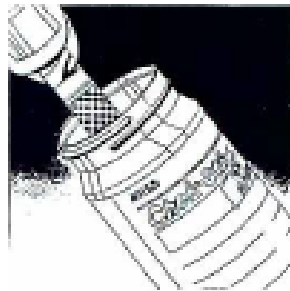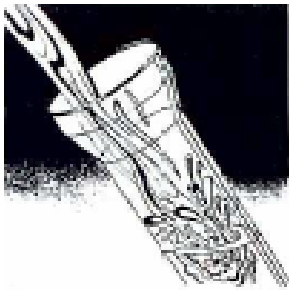

1. Fyll 12 mL destillert vann i et prøverør. IKKE Springvann.
2. Ta ut en negativ eller positiv Chek-Stix[®], og skru lokket godt på igjen.
3. Legg Chek-Stix[®] i røret med vann, og kork røret
4. Bland røret ved å vende røret forsiktig frem og tilbake i 2 minutter.



5. La prøverøret stå i 30 minutter i romtemp.
6. Vend røret om en gang til.
7. Fjern og kast Chek-Stix[®].

Oppbevaring og stabilitet

- ✓ Chek-Stix-kontrolstrimler skal oppbevares ved romtemperatur mellom 15–30°C i den originale beholder med lokket skrudd stramt på. Unngå direkte sollys. Kontrolstriklene forbliver stabile inntil den utløpsdato som er angitt på beholderen.
- ✓ Den oppløste kontrollen er stabil i 8 timer ved 18–23°C untatt bilirubin (i den pos.kontrollen) som er stabil i 3 timer.
- ✓ Kontrollopløsningen skal håndteres og testes på samme måte som en urinprøve.
- ✓ Dypp ikke mer en 12 urinstrimler i pr. kontroll løsning da de forventede verdier kan endre seg på enkelte paramterere.