

Kvalitetssikre urinanalyser!

Chek-Stix® Combo



Positiv og negativ kontroll for test av urinstrimler fra Siemens Medical Solutions Diagnostics. **Positiv Chek-Stix** gir et positivt eller forhøyet resultat. **Negativ Chek-Stix** gir et negativt eller normalt resultat ved avlesing.

Test	Positiv Chek-Stix		Negativ Chek-Stix
	Nordiske enheter	SI-enheter	
U-glukose	1+ – 2+	5,5 – 14 mmol/l	Negativ
U-acetoacetat	Positiv	Positiv	Negativ
U-densitet	1,000 – 1,015	1,000 – 1,015	1,010 – 1,020
U-blod	2+ – 3+	80 – 200 Ery/ μ L	Negativ
U-pH	≥ 8	≥ 8	6,0 – 7,0
U-protein	Spor ($\pm$) – 2+	Spor – 1,0 g/L	Negativ
U-nitritt	Positiv	Positiv	Negativ
U-leukocytter	1+ – 3+	15 – 125 Leuko/ μ L	Negativ

BRUKSANVISNING

1. Fyll et prøverør med 12 ml destillert vann. (Ikke springvann!).
2. Ta en Chek-Stix ut av boksen. (Positiv eller Negativ).
3. Legg strimmelen i prøverøret. Sett på korken.
4. Snu prøverøret frem og tilbake i 2 minutter.
5. La så prøverøret stå i 30 minutter i romtemperatur.
6. Snu prøverøret ytterligere en gang. Fjern så strimmelen.
7. Den syntetiske urinen er holdbar i 8 timer og skal oppbevares i romtemperatur.

Chek-Stix® Combo

www.siemens.com/diagnostics

SIEMENS
medical