



ViTri:Sårfilm med pute

Produktbeskrivelse:

ViTri:Sårfilm med pute er en transparent, semipermeabel dusjbar bandasje bestående av en tynn PU-film med lateksfri heftmasse og en ikke heftende sårpute belagt med perforert PE-film. Bandasjen er permeabel for damp og oksygen. En uskadet bandasje beskytter hudområde mot kontaminasjon utenfra. Lett absorpsjonskapasitet. Sterilt pakket.

Indikasjoner:

Brukes som bandasje postoperativt, ved sårskader og sårskift der det er behov for dusjbar bandasje.

Kontraindikasjoner:

Avbryt bruken av bandasjen hvis pasienten er allergisk overfor noen av bandasjens bestandeler.

Applikasjon:

Rengjør såret og omkringliggende hud. Avvent applisering til alle eventuelle desinfeksjonsmidler eller hudbeskyttelsesmidler er tørket. Før applisering påbegynnes, bøyes bandasjen ved pilmarkeringer der det 2. beskyttelsespapiret skal fjernes for å forenkle fjerning av det 2. beskyttelsespapiret etter applisering. Ikke rør limet. Dra av beskyttelsespapiret slik at den vedheftende overflaten delvis frigjøres. Behold grepet i beskyttelsespapiret mot vedheftsflaten, og påbegynn applisering over området som skal dekkes. Plasser bandasjen midt over flaten som skal dekkes. Dra beskyttelsespapirene i hver sin retning til de er helt fjernet. Stryk fast bandasjen fra midten og utover kantene for å sikre at bandasjen slutter tett i kantene. Stryk ekstra rundt kantene for å sikre at de festes ordentlig før det 2. beskyttelsespapiret fjernes.

Vedlikehold etter applisering:

Bandasjen byttes i samsvar med vanlig praksis på klinikken eller hvis bandasjens barrierebeskyttende egenskaper er skadet, f.eks. punktert eller har sluppet i en kant.

| Artikkelnummer | Beskrivelse |
|----------------|--|
| 802011 | 5 x 7 cm, med sårdyne, 100 stk./pk., 1200 stk./stor pk. |
| 802013 | 6 x 10 cm, med sårdyne, 50 stk./pk., 1200 stk./stor pk. |
| 802014 | 9 x 10 cm, med sårdyne, 50 stk./pk., 1200 stk./stor pk. |
| 802015 | 9 x 15 cm, med sårdyne, 50 stk./pk., 1200 stk./stor pk. |
| 802016 | 10 x 20 cm, med sårdyne, 50 stk./pk., 1200 stk./stor pk. |
| 802017 | 10 x 12 cm, med sårdyne, 50 stk./pk., 1200 stk./stor pk. |
| 802018 | 10 x 25 cm, med sårdyne, 50 stk./pk., 750 stk./stor pk. |
| 802019 | 10 x 30 cm, med sårdyne, 50 stk./pk., 750 stk./stor pk. |
| 802020 | 10 x 35 cm, med sårdyne, 50 stk./pk., 750 stk./stor pk. |