



Tubi-Trak



Produktbeskrivning och användningsområde:

Avsedd användning god förankring/fixering av olika katetrar, sonder, slangar eller dränage. Består av en platta av polyuretanskum belagd med akrylathäftmassa samt vingar som fästs runt det som ska fixeras. Dessa kan öppnas och återförslutas så att det går att ändra läge på slang eller sond, dränage utan att behöva byta hela produkten.

Försiktighetsåtgärder:

- Ej för upprepade appliceringar på samma ställe, försök byta ställe då ny fixering appliceras för att undvika att huden skadas.
- Ej för upprepade appliceringar på skör hud

Varning:

Avbryt användandet av fixeringen om patienten är allergisk mot något av förbandets komponenter, vidhäftande ämne.

Applikation:

Applicera plattan mot hud där behov finns för säker fixering genom att lossa releasepapprets flikar och stryka fast plattan. Forma vingarna på ovansidan rund det som avses att fixeras och lossa även på releasepappret och fäst vingarna. Vid behov går de att öppnas och återförslutas för att ändra på läget av det som fixerats.

Artikelnummer	Beskrivning
803018	Tubi-Trak fixering, 100x37 mm, 50 st/avdfp, 500 st/trpfp