




Xerisof

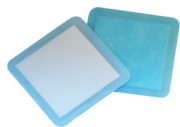

Produktbeskrivning:

Xerisof är en superabsorberande dyna som utgörs av ett flerskiktssystem av superabsorbenter. Särviden av förbandet bestående av PE nätfilm utgörs av ej vidhäftande material för att undvika trauma vid avlägsnandet av förbandet. Kärnan av förbandet utgörs av superabsorbenter och polyuretanskum vilka kan absorbera sårsvätska kontinuerligt, innesluta sårsvätskan i kärnan och förhindra sårområdet från att torka ut samtidigt som det omkringliggande hudområdet skyddas mot maceration. Baksida av vattenavvisande non-woven. Tack vare förmågan att hantera stora mängder sårsekret utan att det sprids på omgivande hudområden medverkar förbandet till en god sårhelingsmiljö.

Indikationer:

Kan appliceras på måttligt till rikligt vätskande sår såsom bensår, trycksår, delhudsbrännskador.

Kontraindikationer:

Bör ej användas på uttorkade sår eller nekrotiska sår.

Applikation:

Rengör hudområdet och säkerställ att området är rent och torrt innan förbandet appliceras. Välj ut en storlek som överlappar med minst 2 cm runt om på den friska omkringliggande huden. Förbandet appliceras med den vita sidan mot såret, fixera med lämpligt fixeringsförband beroende på omständigheterna. Byts då det är mättat

Bytesfrekvens:

Intervallen mellan byten beror på mängden sårsvätska, superabsorberande förband applicerad på kraftigt vätskande sår kan behöva bytas dagligen initialt medan bytesfrekvensen kan vara betydligt längre då mängden sårsvätska avtagit.

Artikelnummer	Beskrivning
803030	10 x 10 cm, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp
803031	10 x 20 cm, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp
803032	20 x 30 cm, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp
803033	10 x 10 cm, S, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp
803038	10 x 15 cm, S, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp
803034	10 x 20 cm, S, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp
803037	15 x 20 cm, S, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp,
803036	20 x 25 cm, S, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp,
803035	20 x 30 cm, S, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp,