



Sitag Foam Silicone



Produktbeskrivelse:

Sitag foam silicone er en absorberende selvheftende polyuretanskumbandasje. Den ytre overflaten av skumbandasjen består av en fuktgjennomtrengelig polyuretanfilm som fungerer som en barriere mot væske og mikroorganismer. Såroverflaten av bandasjen er belagt med et lag silikongel som ikke setter seg fast i såret eller forårsaker skade på nydannet vev ved kassering av bandasjen. Silikonlaget er lett klebrig, noe som forenkler applisering og retensjon av bandasjen på intakt hud uten av den grunn å forårsake vevsskader eller smerte ved fjerning. Bandasjen absorberer eksudat og beskytter omkringliggende hud fra masesjon. Den kan også brukes under kompresjon.

Indikasjoner:

Bandasjen er egnet for mange forskjellige typer sår, inkl. bein- og trykksår, brannskader av enklere karakter, riv- og skrubbsår, ømtålelig hud.

Kontraindikasjoner:

Må ikke brukes hvis pasienten er allergisk overfor noen av komponentene.

Applikasjon:

- Hudområdet rengjøres og tørkes nøye før applisering.
- Velg en størrelse på bandasjen slik at den overlapper ca. 2 cm rundt på omkringliggende frisk hud.
- Grip beskyttelsespapiret og dra utover samtidig som applisering påbegynnes.

Byttefrekvens:

Tilpasses avhengig av mengden sårveske og sårets tilstand. Bandasje byttes i samsvar med den sårpleiepraksis som anvendes. Høyst 7 dager.

Artikkelnummer	Beskrivelse
810409	5 cm x 5 cm, S, 5 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810410	7,5 cm x 7,5 cm, S, 5 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810411	10 cm x 10 cm, S, 5 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810412	10 cm x 20 cm, S, 5 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810413	15 cm x 15 cm, S, 5 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810414	20 cm x 20 cm, S, 5 stk./avdpk., 100 stk./trppk.

ViTri Medical AB
Stensåtravägen 9 A
127 39 SKÄRHOLMEN
SWEDEN

Tlf.: +46-8-747 76 60
vitri.se
info@vitri.se